

**NÃO É SÓ UM EXAME!
É CONTROLE
E SEGURANÇA.
É SAÚDE 4.0!**



greiner BIO-ONE
eTRACK

Guia do usuário: Pacote Trial

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

- Após efetivar a solicitação de trial no site www.gboetrack.com.br
- O responsável irá receber um e-mail contendo um link
- Clicar no link
- Digitar seu usuário e senha informados no e-mail
- No primeiro acesso será solicitado alteração e confirmação da senha
- Seguir este passo a passo para configurar usuários e unidade

**MAIS CONTROLE
E SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
NA HORA DO EXAME.**

Configuração do Manager Cockpit



- \ Rastreabilidade do tipo de tubo utilizado
- \ Número do lote
- \ Exame e paciente
- \ Unidade de atendimento
- \ Profissional de saúde responsável



greiner BIO-ONE
eTRACK

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Barra do menu principal do Manager Cockpit

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para editar o perfil do usuário ou sair clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Novo Usuário

Nome	Gestor GBO eTrack		
Função	Administrador de Matriz		
Código do País	55	Celular	199999999999
Email	silvio@gbo.com.etrack		
Laboratório	GBO Test Lab		

Voltar

Salvar

Tela para editar o perfil do usuário

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para mudar o idioma clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



O sistema está com quatro idiomas disponíveis

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para criar ou editar usuários clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

+ Novo Usuário

Novo Usuário

Nome	<input type="text"/>		
Função	<input type="text"/>		
Código do País	<input type="text"/>	Celular	<input type="text"/>
Senha	<input type="text"/>	Redigitar a Senha	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>		

Voltar

Salvar

Clicando no ícone “Novo Usuário” abre o acesso a tela de configuração

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

A screenshot of a registration form. The form has several fields: 'Nome' (Name), 'Função' (Function), 'do País' (Country), and 'Senha' (Password). A dropdown menu is open for the 'Função' field, showing three options: 'Administrador de Matriz', 'Administrador de Filial', and 'Operador'. The 'do País' field is partially visible on the right, and the 'Senha' field is partially visible at the bottom.

O sistema tem 3 tipos de função, sendo:

- Administrador de Matriz = Responsável pelo laboratório
- Administrador de Filial = Responsável pela unidade
- Operador = Usuário do APP no dispositivo para coleta



IMPORTANTE!

Apenas o operador consegue acessar o APP com seu usuário e senha no dispositivo móvel para o processo na operação.
Os administradores apenas acessam o sistema Manager Cockpit na web.

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para configurar o laboratório e suas unidades clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para acessar o dashboard e relatórios do laboratório e suas unidades clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Selecione o Laboratório

Visão Geral


Clique aqui para selecionar o laboratório e visualizar seu dashboard

**MAIS CONTROLE
E SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
NA HORA DO EXAME.**

Uso do APP nos dispositivos moveis



- \ Rastreabilidade do tipo de tubo utilizado
- \ Número do lote
- \ Exame e paciente
- \ Unidade de atendimento
- \ Profissional de saúde responsável

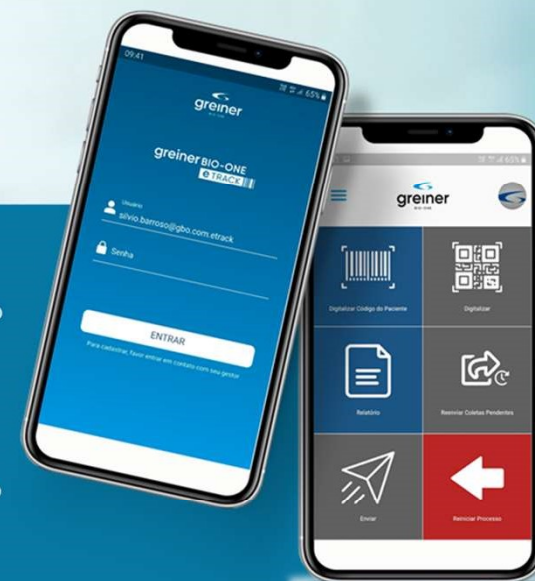

greiner BIO-ONE
eTRACK

Passo a passo




greiner BIO-ONE
eTRACK

- Fazer o download através da Apple Store ou Google Play.
- Clicar no ícone “GBO eTrack” para abrir o APP em seu dispositivo
- Digitar seu usuário e senha

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

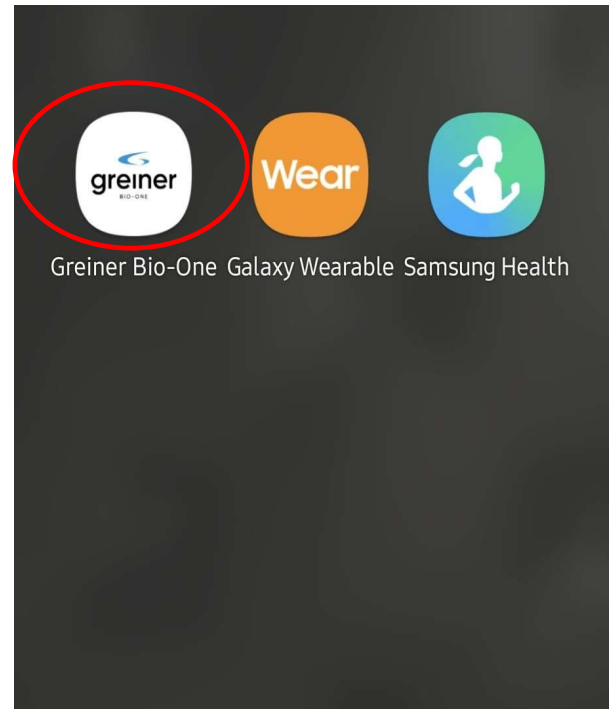

Ícone do GBO
eTrack

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

A screenshot of the greiner BIO-ONE eTRACK login screen. The screen is blue with the greiner logo at the top. Below the logo, the text 'GBO e-Track™' is displayed. There are two input fields: 'Usuário' and 'Senha'. The 'Usuário' field is highlighted with a red oval. Below the fields is a white button labeled 'ENTRAR'. At the bottom, there is a small text line: 'Para cadastrar, favor entrar em contato com seu gestor'.

Digite seu usuário

A screenshot of the greiner BIO-ONE eTRACK login screen, identical to the previous one. The 'Senha' field is highlighted with a red oval.

Digite sua senha

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Clique aqui para
começar




Clique aqui para acessar a
barra de menu do App

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

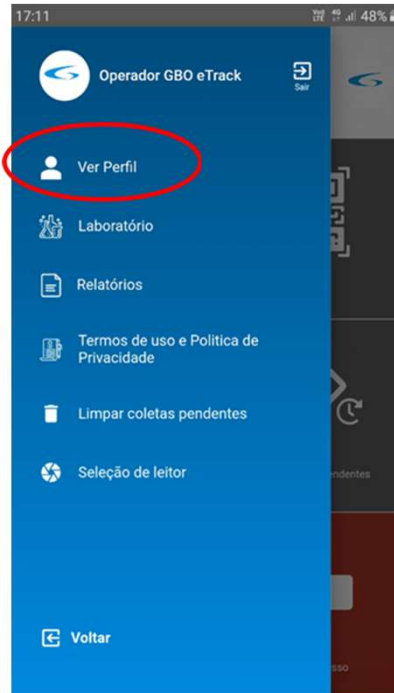

Aqui você pode ver
seu perfil



No seu perfil você pode editar suas
informações e adicionar uma foto

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK




Aqui você pode ver as informações do laboratório



Informações do laboratório

Passo a passo

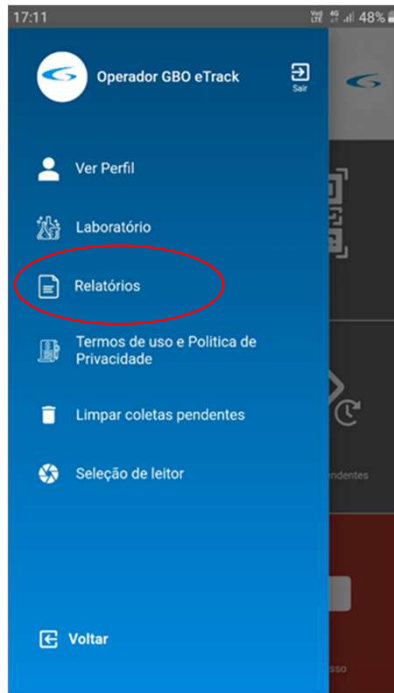

Aqui você pode ver os relatórios, a mesma função do botão no menu principal




Você pode ver os relatórios dos pacientes enviados e pendentes


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

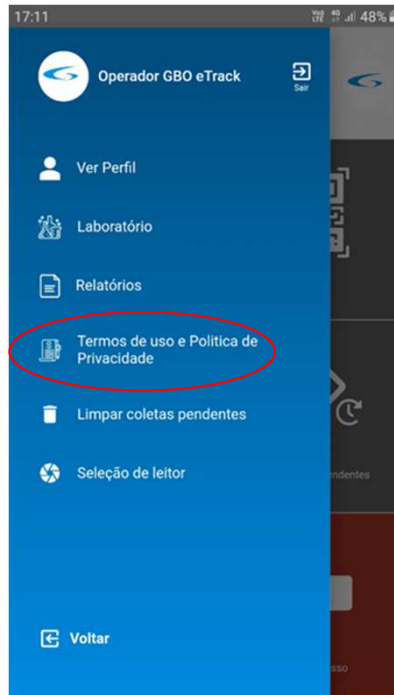

Aqui você pode ver o Termos de Uso e Política de Privacidade

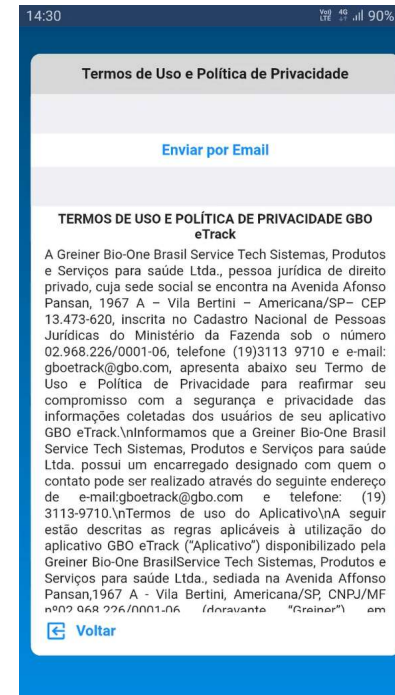


Termos de Uso e Política de Privacidade


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

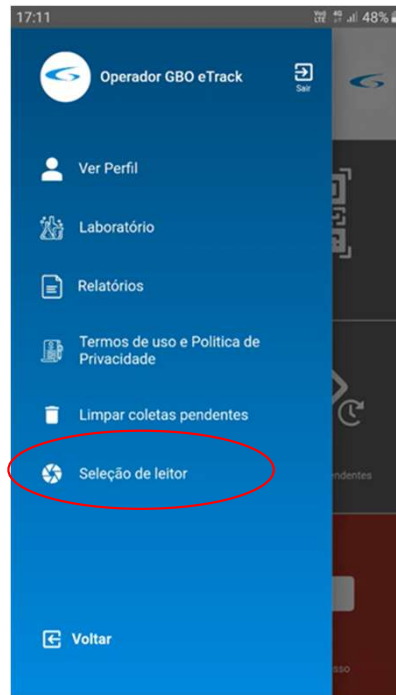

Aqui você pode selecionar o leitor

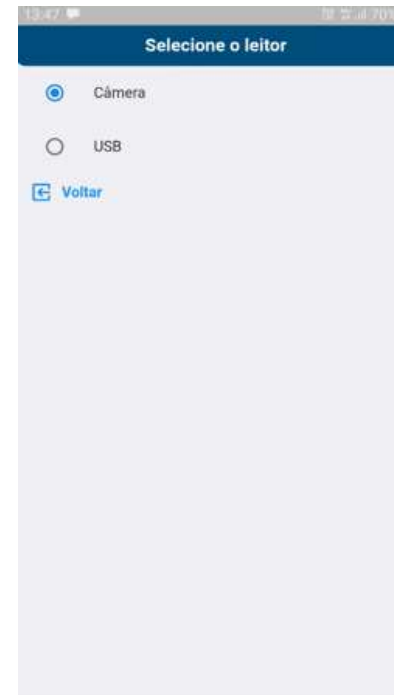


Podendo utilizar a câmera do dispositivo ou um leitor externo


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

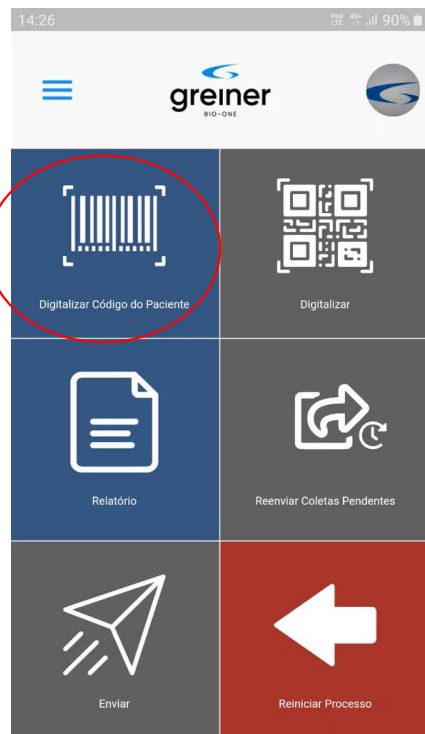

Clique aqui para efetuar a leitura do ID do paciente

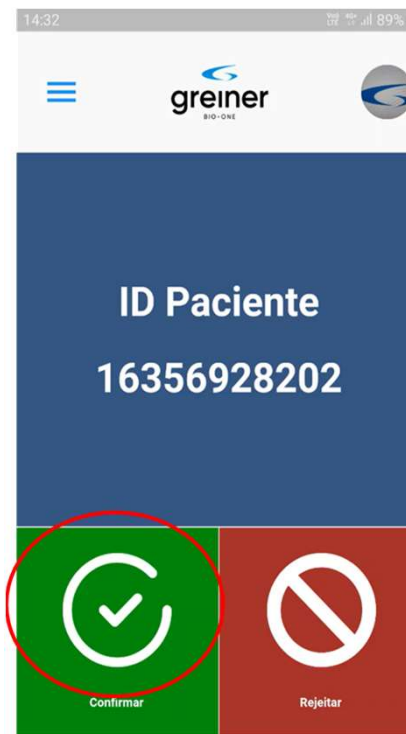


Para confirmar o ID do paciente

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

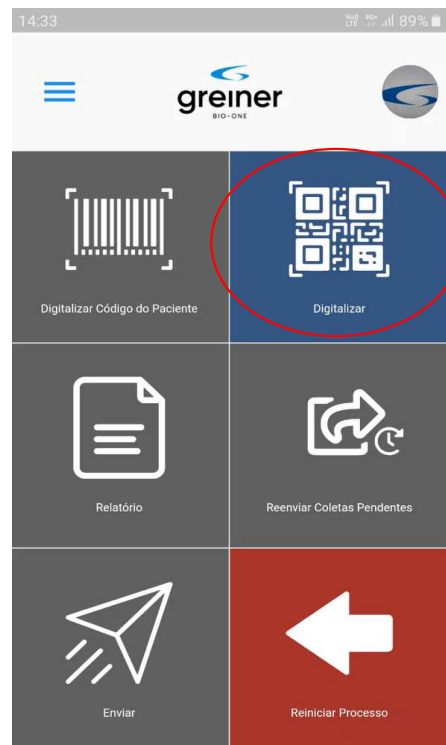

Clique aqui para a iniciar a leitura
do códigos dos materiais

Passo a passo

greiner BIO-ONE
eTRACK



Iniciar com a leitura do barcode da etiqueta da caixa da agulha Greiner que será utilizada




Seguir com o processo de leitura dos tubos e clicar em encerrar ao término


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

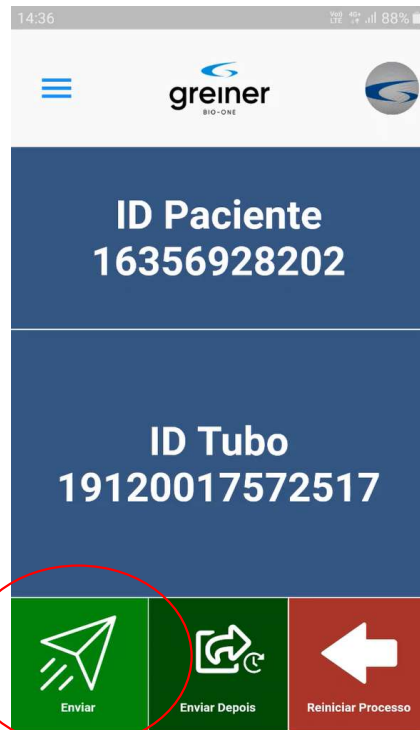

Para enviar as
informações

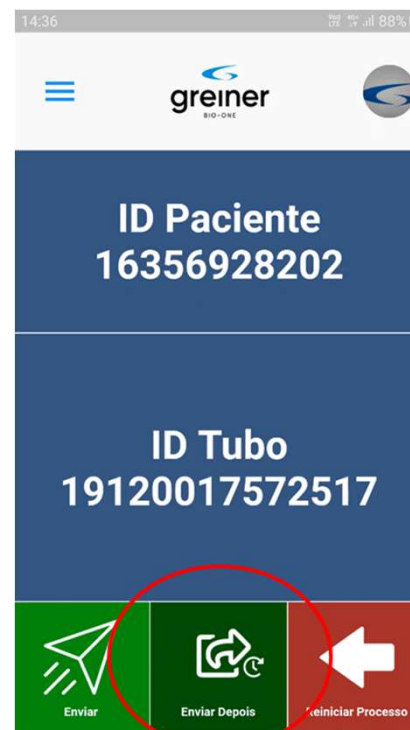


Para enviar as
informações depois


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

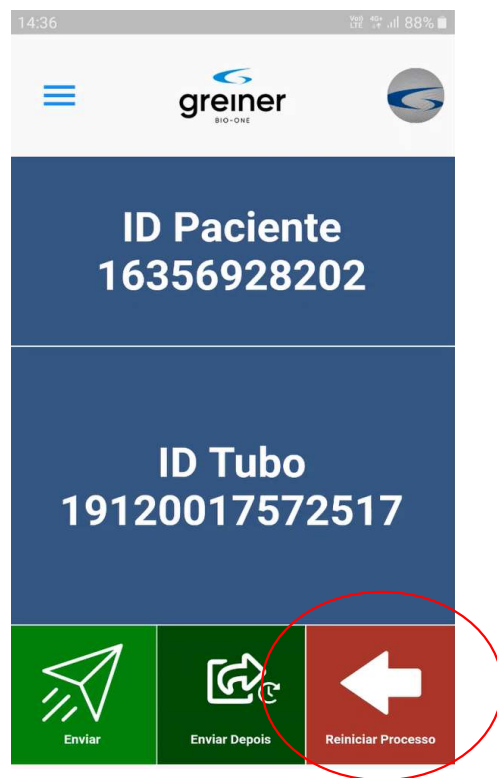

Clique aqui para
reiniciar o processo

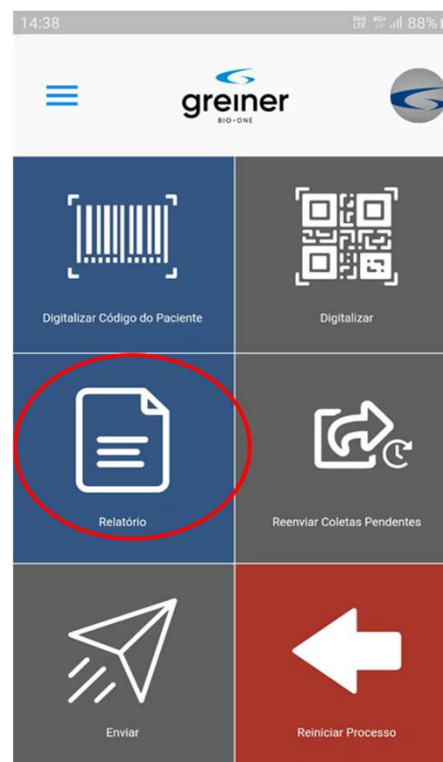

Clique aqui para acessar
os relatórios

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

14:39 87%

Relatórios


Enviado Pendente

29/06/2020 30/06/2020

Data Exame: 30/06/2020 Hora Exame: 14:32 ID do Paciente: 16356928202 ID do Tubo: 19120017572517	Enviado
Data Exame: 30/06/2020 Hora Exame: 12:27 ID do Paciente: 16356928202 ID do Tubo: 19120017572517	Enviado
Data Exame: 30/06/2020 Hora Exame: 12:21 ID do Paciente: 16356928202 ID do Tubo: 19120017572517	Enviado
Data Exame: 30/06/2020 Hora Exame: 10:38 ID do Paciente: 95187778 ID do Tubo: 19120017570513	Enviado
Data Exame: 30/06/2020 Hora Exame: 09:59 ID do Paciente: 18526776 ID do Tubo: 19120017570513	Enviado

Mostrando 5 de 5

[Voltar](#)

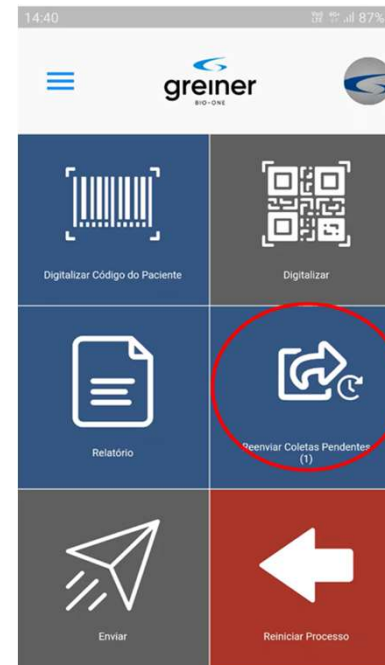


Depois de alguns pacientes e tubos processados, é possível ver o status no relatório.

Clique aqui para reenviar as pendências


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

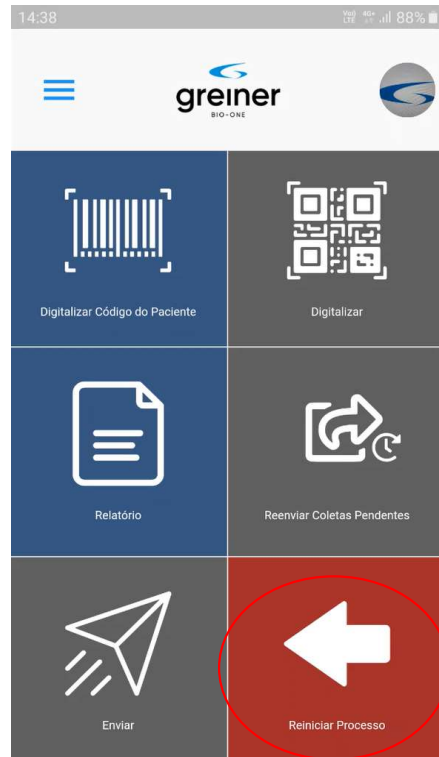

Clique aqui para
reiniciar o processo

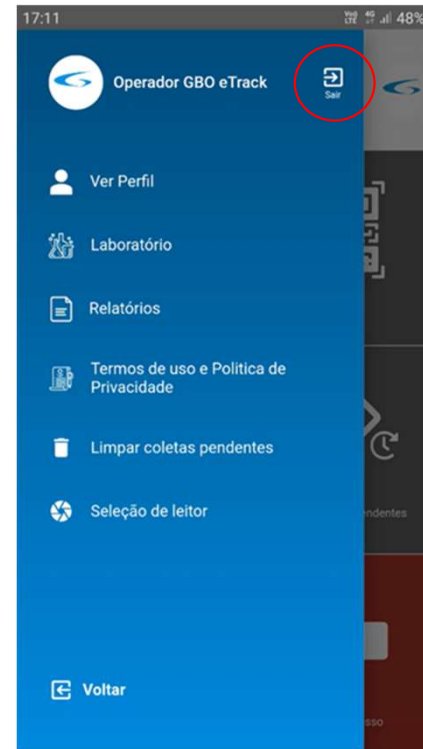

Clique aqui para sair
do APP

Informações no tubo:



greiner BIO-ONE
eTRACK

Exemplo de
etiqueta 2D no
tubo (UDI)



Sequência para leitura de paciente e tubos



greiner BIO-ONE
eTRACK

- 1 - Ler o código com o ID do paciente
- 2 - Ler o código da etiqueta da agulha
- 3 - Ler o código da etiqueta do tubo
- 4 - Se o código da etiqueta não for aceito, clique em “OK” para ler outra etiqueta
- 5 - Se a leitura do código da etiqueta é de um “lote valido”
- 6 - O APP captura a informação da etiqueta e segue para próxima leitura de tubos
- 7 - Clicando em “Terminar”, você encerra o processo de leitura
- 8 - Clicando em “Enviar”, o APP irá enviar a informação coletada
- 9 - Clicando em “Enviar depois”, será enviado posteriormente
- 10 - Após o passo 8 você pode iniciar outro paciente


Configurações possíveis de fluxo:



greiner BIO-ONE
eTRACK

Box de coleta

Com a utilização de dispositivos móveis individuais, cada operador pode efetuar a leitura dos códigos nos tubos diretamente no box de coleta.

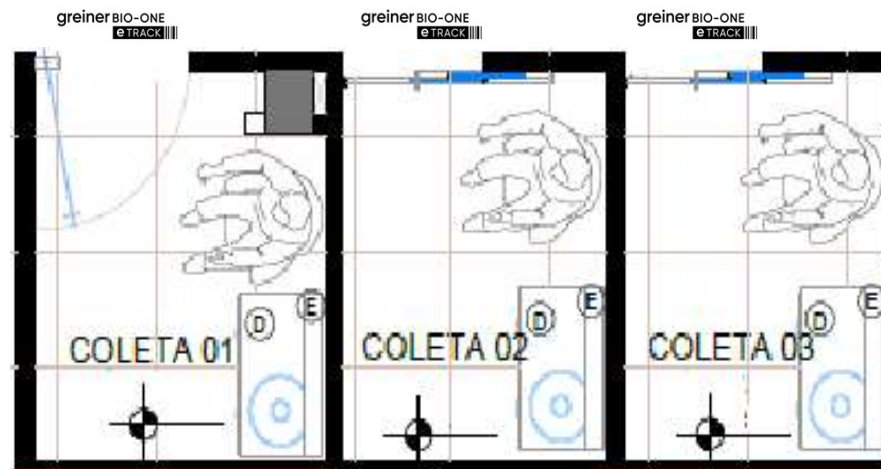


Configurações possíveis de fluxo:



greiner BIO-ONE
eTRACK

Hub de coleta

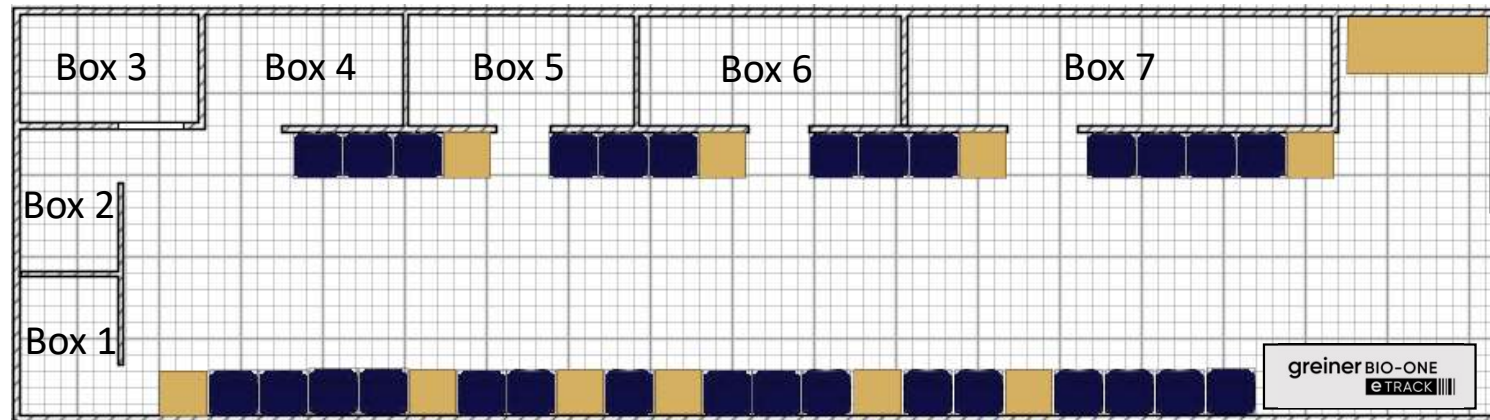

Com a utilização de um único dispositivo móvel, podemos configurar um HUB podendo efetuar a leitura dos códigos nos tubos, preparando assim os kits para coleta.

Configurações possíveis de fluxo:



greiner BIO-ONE
eTRACK

Coleta domiciliar

Com a utilização de um dispositivo móvel com 4G o operador pode efetuar leitura dos códigos nos tubos remotamente, atendendo nas coletas domiciliares.



making a difference

Agradecemos por sua parceria



www.gbo.com

GREINER BIO-ONE
Americana - São Paulo - Brasil
Telefone: +55 19 3468-9600
info@br.gbo.com

E-mail: gboetrack@gbo.com

Developed by:

