

**NÃO É SÓ UM EXAME!
É CONTROLE
E SEGURANÇA.
É SAÚDE 4.0!**



greiner BIO-ONE
eTRACK

Guia do usuário: Pacotes Bronze e Silver

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

- Após efetivar a assinatura no site www.gboetrack.com.br
- O responsável irá receber um e-mail contendo um link
- Clicar no link
- Digitar seu usuário e senha informados no e-mail
- No primeiro acesso será solicitado alteração e confirmação da senha
- Seguir este passo a passo para configurar usuários e unidades

**MAIS CONTROLE
E SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
NA HORA DO EXAME.**

Configuração do Manager Cockpit



- \ Rastreabilidade do tipo de tubo utilizado
- \ Número do lote
- \ Exame e paciente
- \ Unidade de atendimento
- \ Profissional de saúde responsável



greiner BIO-ONE
eTRACK

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Barra do menu principal do Manager Cockpit

Passo a passo



greiner **BIO-ONE**
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para editar o perfil do usuário ou sair clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Novo Usuário

Nome	Gestor GBO eTrack		
Função	Administrador de Matriz		
Código do País	55	Celular	19999999999
Email	silvio@gbo.com.etrack		
Laboratório	GBO Test Lab		

[Voltar](#) [Salvar](#)

Tela para editar o perfil do usuário

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para mudar o idioma clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



O sistema possui quatro idiomas disponíveis

Passo a passo



greiner **BIO-ONE**
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para criar ou editar usuários clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

+ Novo Usuário

Novo Usuário

Nome	<input type="text"/>		
Função	<input type="text"/>		
Código do País	<input type="text"/>	Celular	<input type="text"/>
Senha	<input type="text"/>	Redigitar a Senha	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>		

Voltar

Salvar

Clicando no ícone “Novo Usuário” abre o acesso a tela de configuração

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

A screenshot of a user registration form. The form has several fields: 'Nome' (Name), 'Função' (Function), 'Código do País' (Country Code), and 'Senha' (Password). The 'Função' field is currently selected, and a dropdown menu is open, showing three options: 'Administrador de Matriz', 'Administrador de Filial', and 'Operador'. The 'Senha' field has a label 'Repetir a Senha' (Repeat Password) next to it.

O sistema tem 3 tipos de função, sendo:

- Administrador de Matriz = Responsável pelo laboratório
- Administrador de Filial = Responsável pela unidade
- Operador = Usuário do APP no dispositivo para coleta



IMPORTANTE!

Apenas o operador consegue acessar o APP com seu usuário e senha no dispositivo móvel para o processo na operação.
Os administradores apenas acessam o sistema Manager Cockpit na web.

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários




Para configurar o laboratório e suas unidades clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Laboratórios

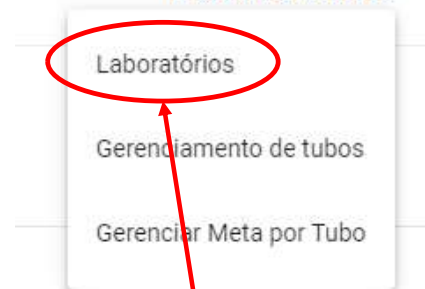




Para ver o cadastro do laboratório e criar filiais ou unidades clique aqui.

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

greiner / laboratories / list


 	
Nome	
	GBO Test Lab

Para ver o cadastro do laboratório clique aqui.

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



+ Novo Laboratório

Para criar uma filial ou nova unidade clique em “+ Novo Laboratório”.

Passo a passo



Novo Laboratório

Formulário de criação de novo laboratório com campos para:

- Nome
- CNPJ
- Sufix
- Telefone
- Dias Reportáveis
- Responsável
- HUB
- CEP
- Endereço
- Complemento
- Número
- Bairro
- Cidade
- Estado
- Meta coleta: 0 segundos
- Plano
- Habilitar QR Code Externo: Não
- Integração Lis: Não
- Horário de Funcionamento: Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
- Das: Até:

Botões: Voltar, Salvar

No formulário da nova filial inserir no campo “sufix” o apelido da unidade, exemplo: Filial 1.

Passo a passo

greiner BIO-ONE
eTRACK



Novo Laboratório

Nome

CNPJ Sufix gbo.com.etrack

Telefone Dias Reportáveis

Responsável HUB

CEP Endereço

Complemento Número

Bairro Cidade Estado

Meta coleta segundos Plano

Habilitar QR Code Externo

Integração Lis

Horário de Funcionamento

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Das: Até:

Informar no campo “Dias Reportáveis” a quantidade de dias de relatório que o operador terá acesso no APP.

Passo a passo

greiner BIO-ONE
eTRACK



Novo Laboratório

Nome

CNPJ Sufix gbo.com.etrack

Telefone Dias Reportáveis

Responsável HUB

CEP Endereço

Complemento Número

Bairro Cidade Estado

Meta coleta segundos Plano


Habilitar QR Code Externo

Integração Lis

Horário de Funcionamento

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Das: Até:

Informar no campo “HUB”; **Sim**: se a unidade irá trabalhar com ponto central de coleta; **Não**: se a unidade irá trabalhar com um dispositivo em cada box de coleta.

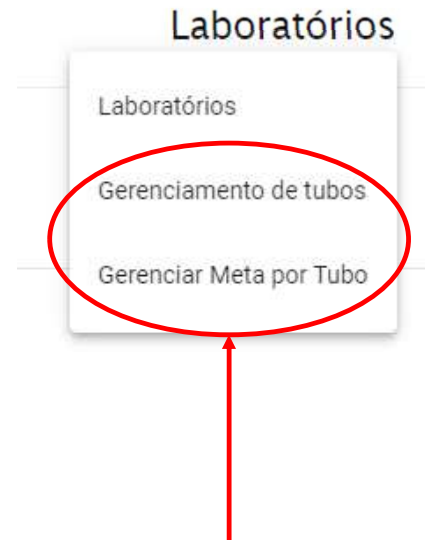

Na versão Silver é possível gerenciar o estoque de tubos e configurar as metas por unidades

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Estoque

ID Tubo	Qtd de tubo(s)	Registro	
454036	800	01/09/2020	↔
454084	900	01/09/2020	↔
454071	800	01/09/2020	↔
454327	1000	01/09/2020	↔
454332BR	100	22/01/2021	↔
454107BR	100	22/01/2021	↔
454482BR	100	22/01/2021	↔
456036BR	100	22/01/2021	↔
456071BR	100	22/01/2021	↔
454327BR	100	22/01/2021	↔

Clique aqui para transferir tubos para as unidades

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Nova Meta

Material	Meta	
451090	3000	+
454036	1000	+
454084	1000	+
1830033	1000	+
1765304	1000	+
1831312	1000	+
454332BR	100	+
454107BR	100	+

Clique aqui para definir a meta de tubos, sendo adotada com estoque mínimo

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários




Para acessar o dashboard e relatórios do laboratório e suas unidades clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

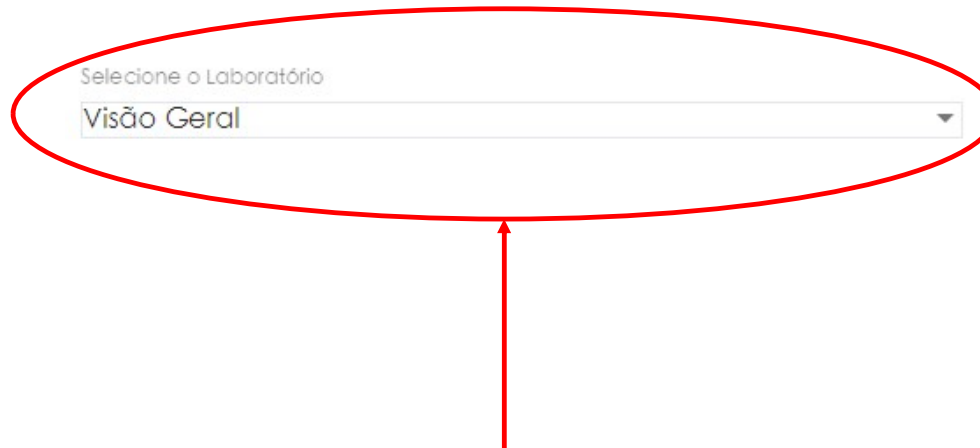


Clique aqui para selecionar o laboratório e visualizar seu dashboard

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Manager Cockpit

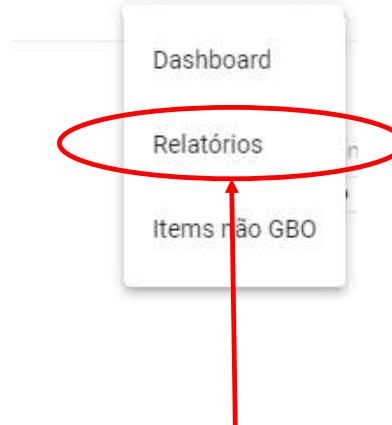

Clique aqui para selecionar e visualizar os relatórios do laboratório

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Laboratório	Exame	Paciente	Tubo	Operador
GB0 Test Lab	21/01/2021 14:54	2001210002	454036BR C201136G 04/03/2022, 454036BR C201136G 04/03/2022	Operador GB0 eTrack
GB0 Test Lab	21/01/2021 14:30	2001210002	454107BR C2011365 01/11/2024	Operador GB0 eTrack
GB0 Test Lab	21/01/2021 14:25	2001210002	454036BR C201136G 04/03/2022, 456071BR C201136S 04/03/2022, 454107BR C2011365 01/11/2024	Operador GB0 eTrack
GB0 Test Lab	21/01/2021 14:19	2001210002	454107BR C2011365 01/11/2024	Operador GB0 eTrack
GB0 Test Lab	20/01/2021 10:18	2001210002	454036BR C201136G 04/03/2022, 456071BR C201136S 04/03/2022, 454107BR C2011365 01/11/2024	Operador GB0 eTrack
GB0 Test Lab	20/01/2021 11:59	2001210009	454482BR C20113BK 01/02/2022, 454107BR C2011365 01/11/2024	Operador GB0 eTrack
GB0 Test Lab	20/01/2021 10:20	2001210001	456071BR C201136S 04/03/2022, 454036BR C201136G 04/03/2022, 454482BR C20113BK 01/02/2022, 454107BR C2011365 01/11/2024	Operador GB0 eTrack
GB0 Test Lab	20/01/2021 10:19	2001210003	454036BR C201136G 04/03/2022, 456071BR C201136S 04/03/2022, 454036BR C201136G 04/03/2022, 454482BR C20113BK 01/02/2022, 456071BR C201136S 04/03/2022, 454107BR C2011365 01/11/2024	Operador GB0 eTrack

Items per page: 10 1 - 8 of 8 << < > >>



Clique aqui para gerar o arquivo CSV do relatório

**MAIS CONTROLE
E SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
NA HORA DO EXAME.**

Uso do APP nos dispositivos moveis



- \ Rastreabilidade do tipo de tubo utilizado
- \ Número do lote
- \ Exame e paciente
- \ Unidade de atendimento
- \ Profissional de saúde responsável



greiner BIO-ONE
eTRACK

Passo a passo




greiner BIO-ONE
eTRACK

- Fazer o download através da Apple Store ou Google Play.
- Clicar no ícone “GBO eTrack” para abrir o APP em seu dispositivo
- Digitar seu usuário e senha

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

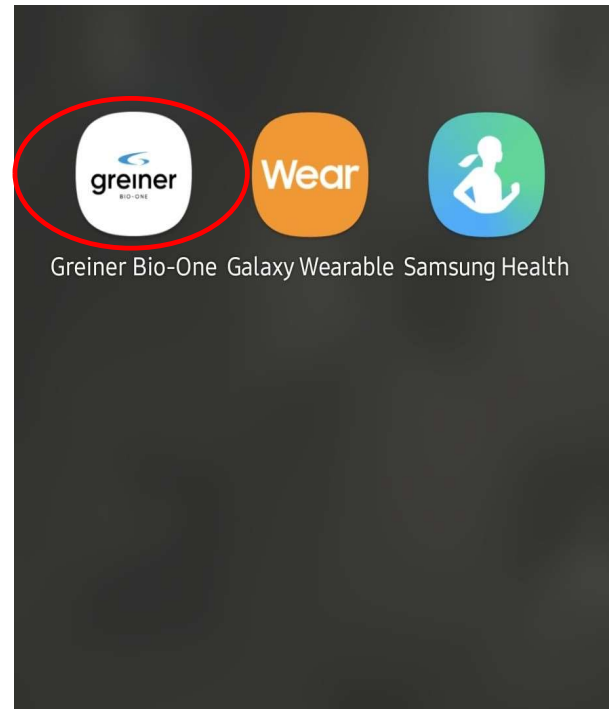

Ícone do GBO
eTrack

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

A screenshot of the greiner BIO-ONE eTRACK login screen. The screen is blue with the greiner logo at the top. Below the logo, the text 'GBO e-Track™' is displayed. There are two input fields: 'Usuário' and 'Senha'. The 'Usuário' field is highlighted with a red oval. Below the input fields is a white button labeled 'ENTRAR'. At the bottom, there is a small text line: 'Para cadastrar, favor entrar em contato com seu gestor'.

Digite seu usuário

A screenshot of the greiner BIO-ONE eTRACK login screen, identical to the previous one. The 'Senha' field is highlighted with a red oval.

Digite sua senha

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Clique aqui para
começar




Clique aqui para acessar a
barra de menu do App

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

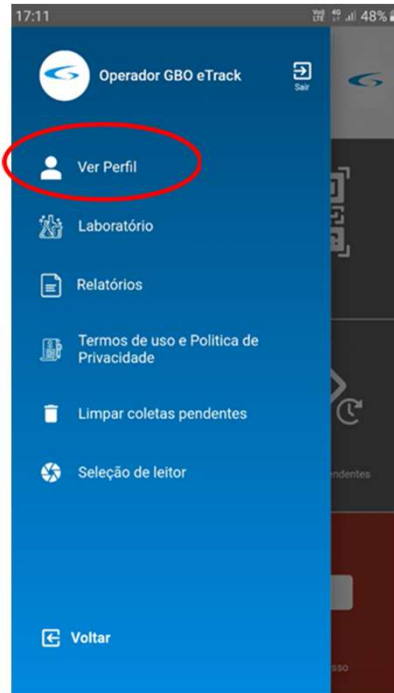

Aqui você pode ver
seu perfil




No seu perfil você pode editar suas
informações e adicionar uma foto

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

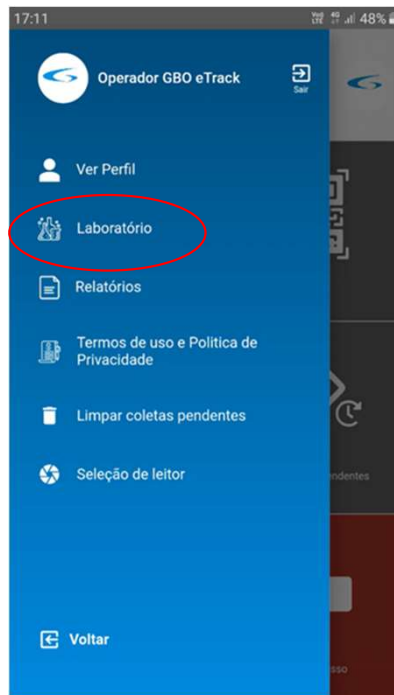


Aqui você pode ver as informações do laboratório



Informações do laboratório

Passo a passo

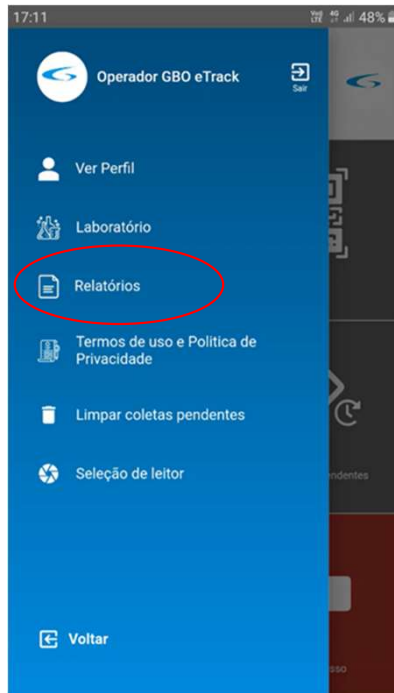

Aqui você pode ver os relatórios, a mesma função do botão no menu principal




Você pode ver os relatórios dos pacientes enviados e pendentes


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

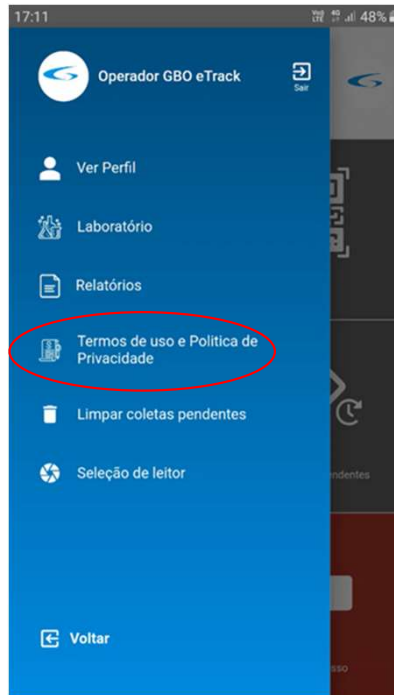

Aqui você pode ver o Termos de Uso e Política de Privacidade

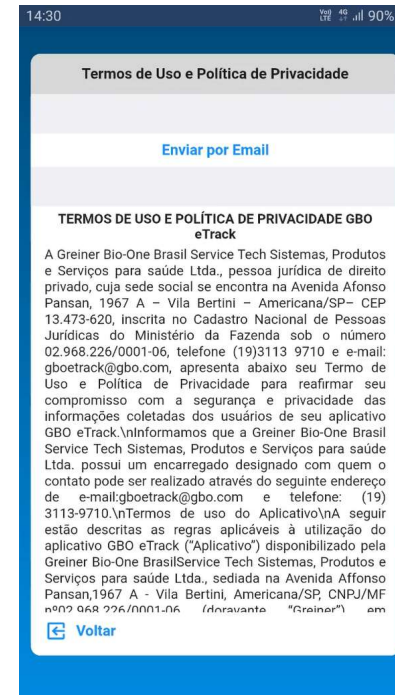


Termos de Uso e Política de Privacidade


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

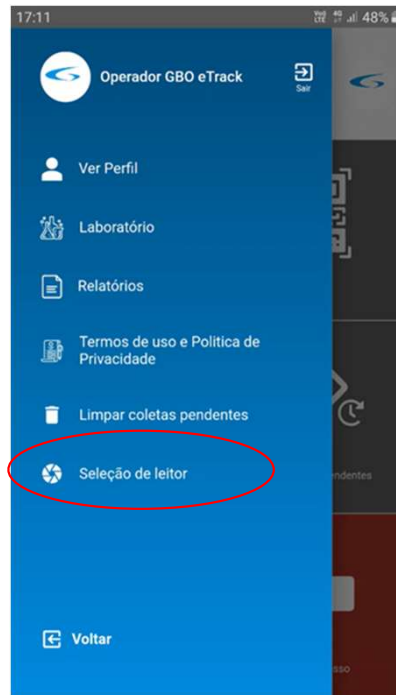

Aqui você pode selecionar o leitor

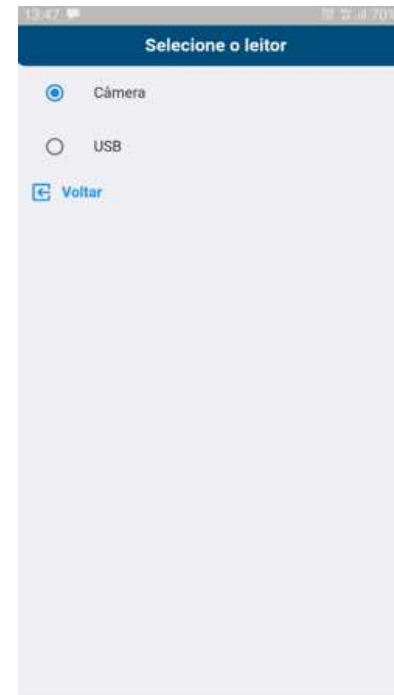


Podendo utilizar a câmera do dispositivo ou um leitor externo


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

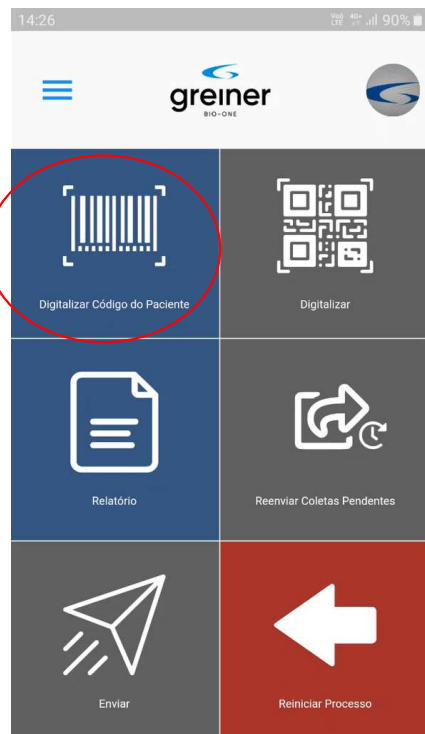

Clique aqui para efetuar a leitura do ID do paciente

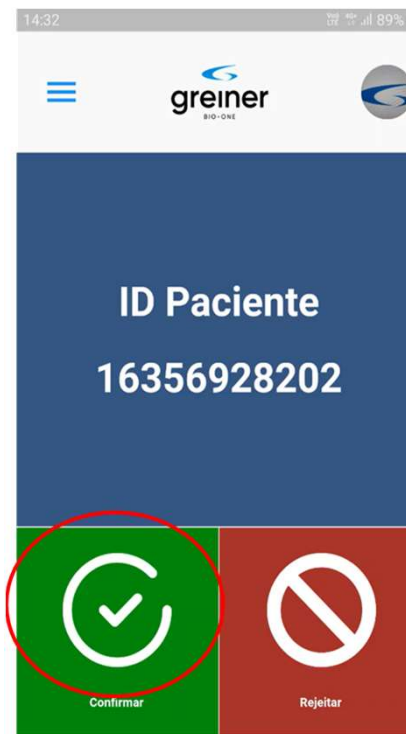


Para confirmar o ID do paciente

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

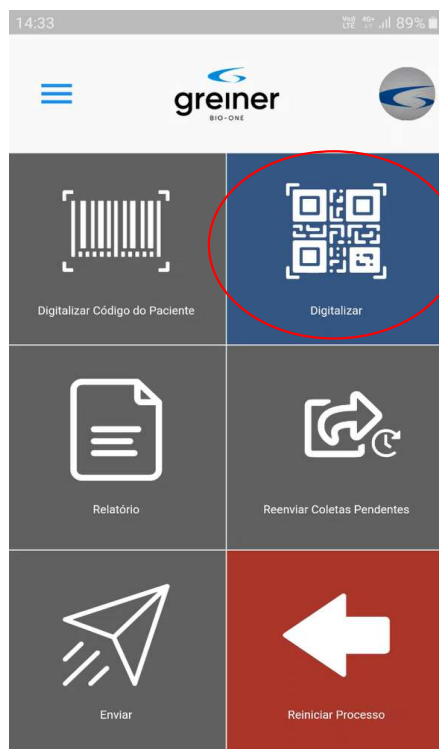

Clique aqui para a leitura dos códigos dos materiais

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Iniciar com a leitura do código de barras da etiqueta da caixa da agulha Greiner a ser utilizada




Seguir para o processo de leitura dos tubos e clicar em encerrar ao término


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

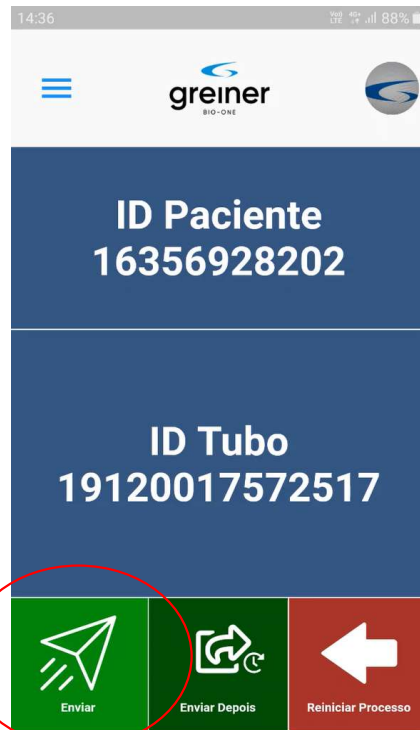

Para enviar as
informações

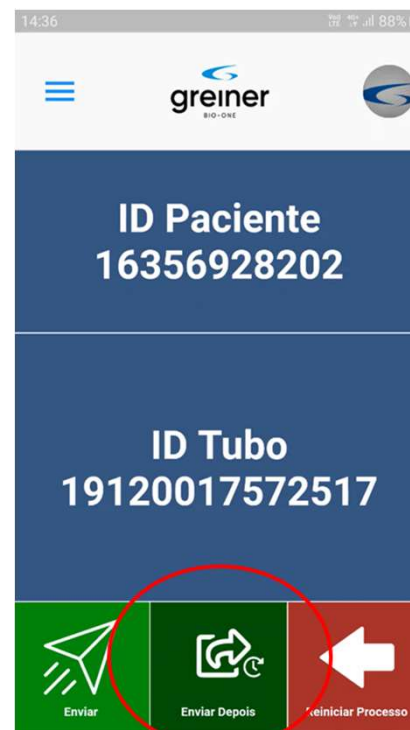


Para enviar as
informações depois


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

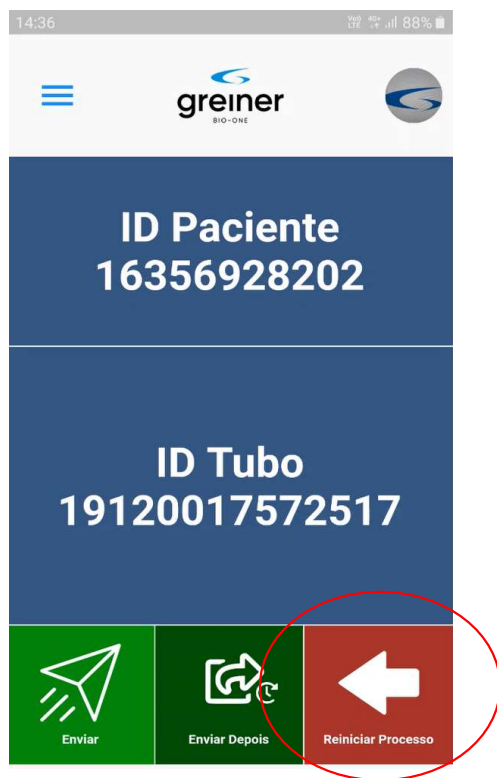

Clique aqui para
reiniciar o processo

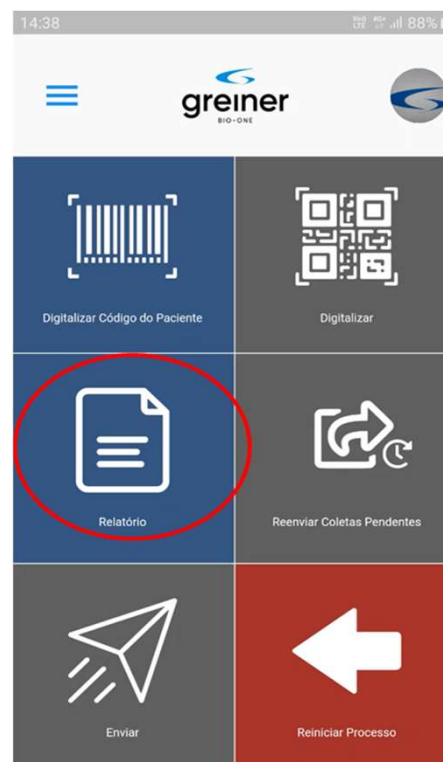

Clique aqui para acessar
os relatórios

Passo a passo




greiner BIO-ONE
eTRACK

Relatórios	
Enviado	Pendente
29/06/2020	30/06/2020
Data Exame: 30/06/2020 Hora Exame: 14:32 ID do Paciente: 16356928202 ID do Tubo: 19120017572517	Enviado
Data Exame: 30/06/2020 Hora Exame: 12:27 ID do Paciente: 16356928202 ID do Tubo: 19120017572517	Enviado
Data Exame: 30/06/2020 Hora Exame: 12:21 ID do Paciente: 16356928202 ID do Tubo: 19120017572517	Enviado
Data Exame: 30/06/2020 Hora Exame: 10:38 ID do Paciente: 95187778 ID do Tubo: 19120017570513	Enviado
Data Exame: 30/06/2020 Hora Exame: 09:59 ID do Paciente: 18526776 ID do Tubo: 19120017570513	Enviado

Mostrando 5 de 5

[Voltar](#)

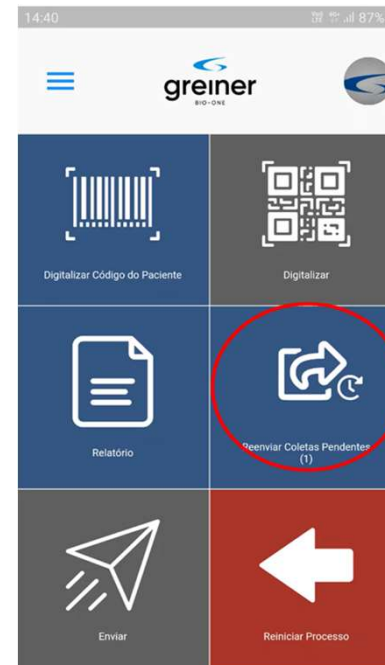


Depois de alguns pacientes e tubos processados, é possível ver o status no relatório.

Clique aqui para reenviar as pendências


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

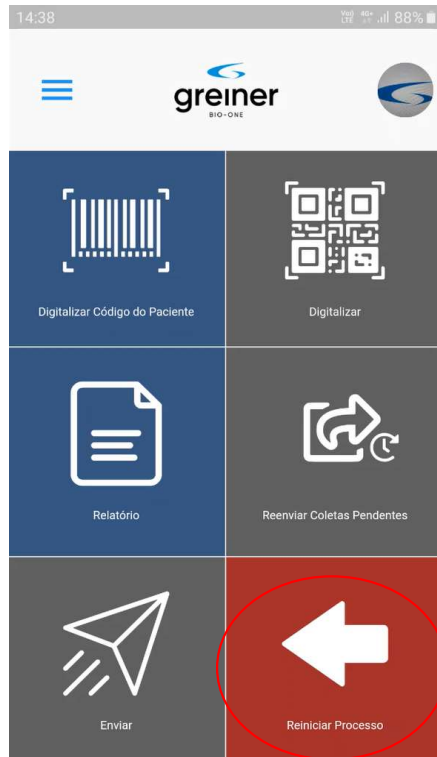

Clique aqui para
reiniciar o processo

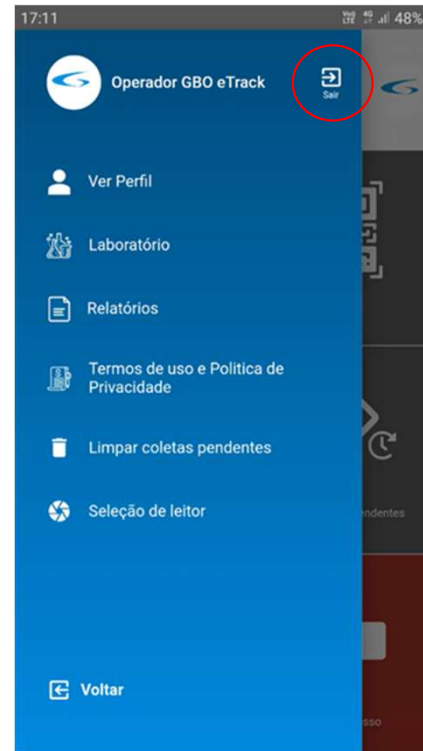

Clique aqui para sair
do APP

Informações no tubo:



greiner BIO-ONE
eTRACK

Exemplo de
etiqueta 2D no
tubo (UDI)



Sequência para leitura de paciente e tubos



greiner BIO-ONE
eTRACK

- 1 - Ler o código com o ID do paciente
- 2 - Ler o código da caixa da agulha
- 3 - Ler o código da etiqueta do tubo
- 4 - Se o código da etiqueta não for aceito, clique em “OK” para ler outra etiqueta
- 5 - Se a leitura do código da etiqueta é de um “lote valido”
- 6 - O APP captura a informação da etiqueta e segue para próxima leitura de tubos
- 7 - Clicando em “Terminar”, você encerra o processo de leitura
- 8 - Clicando em “Enviar”, o APP irá enviar a informação coletada
- 9 - Clicando em “Enviar depois”, será enviado posteriormente
- 10 - Após o passo 8 você pode iniciar outro paciente


Configurações possíveis de fluxo:



greiner BIO-ONE
eTRACK

Box de coleta

Com a utilização de dispositivos móveis individuais, cada operador pode efetuar a leitura dos códigos nos tubos diretamente no box de coleta.

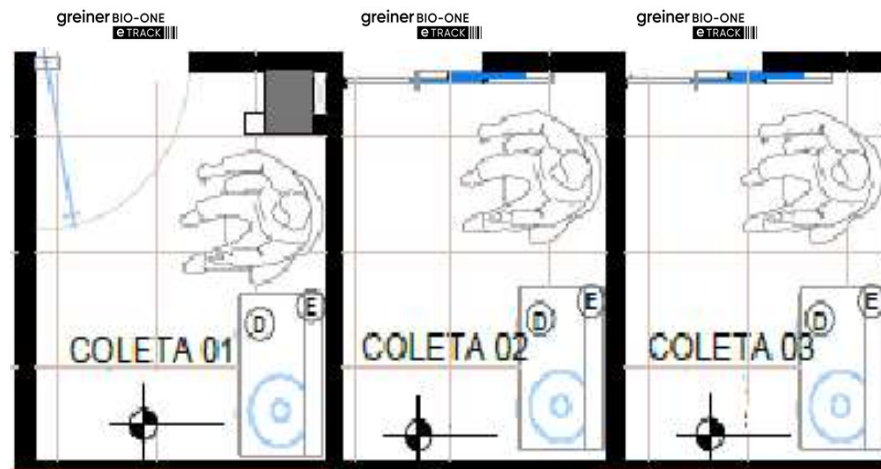


Configurações possíveis de fluxo:



greiner BIO-ONE
eTRACK

Hub de coleta

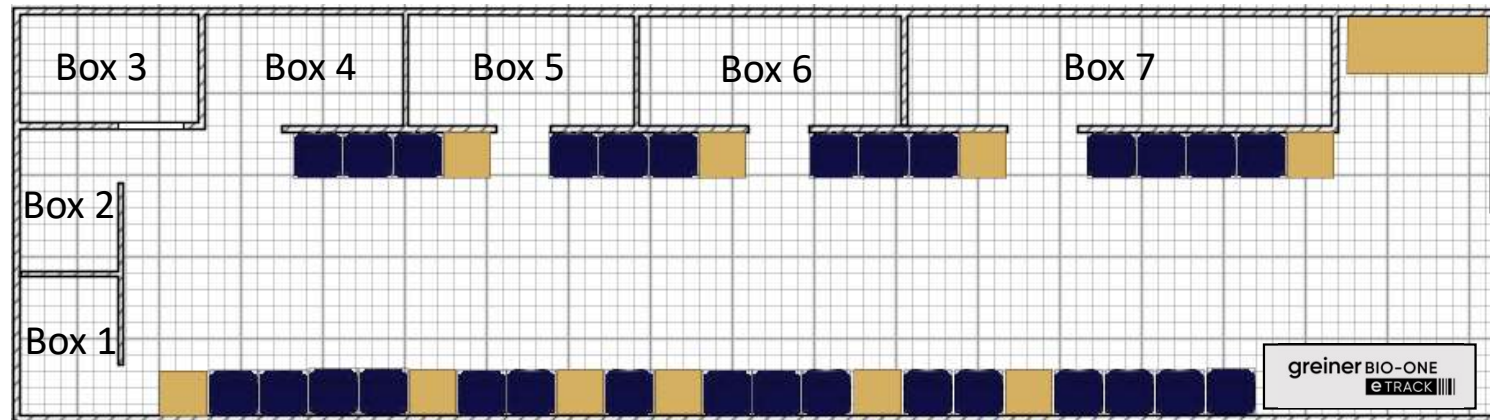

Com a utilização de um único dispositivo móvel, podemos configurar um HUB podendo efetuar a leitura dos códigos nos tubos, preparando assim os kits para coleta.

Configurações possíveis de fluxo:



greiner BIO-ONE
eTRACK

Coleta domiciliar

Com a utilização de um dispositivo móvel com 4G o operador pode efetuar leitura dos códigos nos tubos remotamente, atendendo nas coletas domiciliares.



making a difference

Agradecemos por sua parceria



www.gbo.com

GREINER BIO-ONE
Americana - São Paulo - Brasil
Telefone: +55 19 3468-9600
info@br.gbo.com

E-mail: gboetrack@gbo.com

Developed by:

