

**NÃO É SÓ UM EXAME!
É CONTROLE
E SEGURANÇA.
É SAÚDE 4.0!**



greiner BIO-ONE
eTRACK

Guia do usuário: Pacote Gold

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

- Após efetivar a assinatura no site www.gboetrack.com.br
- O responsável irá receber um e-mail contendo um link
- Clicar no link
- Digitar seu usuário e senha informados no e-mail
- No primeiro acesso será solicitado alteração e confirmação da senha
- Seguir este passo a passo para configurar usuários e unidades

**MAIS CONTROLE
E SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
NA HORA DO EXAME.**

Configuração do Manager Cockpit



greiner BIO-ONE
eTRACK

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Barra do menu principal do Manager Cockpit

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Editar Perfil
Alterar senha
Sair

Para editar o perfil do usuário, alterar senha ou sair clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Novo Usuário

Nome	Gestor GBO eTrack		
Função	Administrador de Matriz		
Código do País	55	Celular	19999999999
Email	silvio@gbo.com.etrack		
Laboratório	GBO Test Lab		

[Voltar](#) [Salvar](#)

Tela para editar o perfil do usuário

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para mudar o idioma clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



O sistema possui quatro idiomas disponíveis

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para visualizar os alertas clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Usuários



Tubo 454482BR está com estoque zerado

Tubo 456071BR está com estoque zerado



Tubo 454332BR está com estoque baixo

Tubo 454107BR está com estoque zerado

Tubo 456071BR está com estoque baixo

Tubo 454327BR está com estoque baixo

Tubo 456036BR está com estoque baixo

Tubo 454036BR está com estoque zerado

Para confirmar a leitura do alerta clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para criar ou editar usuários clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

+ Novo Usuário

Novo Usuário

Nome	<input type="text"/>		
Função	<input type="text"/>		
Código do País	<input type="text"/>	Celular	<input type="text"/>
Senha	<input type="text"/>	Redigitar a Senha	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>		

Voltar

Salvar

Clicando no ícone “Novo Usuário” abre o acesso a tela de configuração

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

A screenshot of the user registration form in the greiner BIO-ONE eTRACK app. The form includes fields for 'Nome', 'Função', 'Código do País', and 'Senha'. A dropdown menu is open under the 'Função' field, showing three options: 'Administrador de Matriz', 'Administrador de Filial', and 'Operador'. The 'Senha' field has a 'Repetir a Senha' label next to it.

O sistema tem 3 tipos de função, sendo:

- Administrador de Matriz = Responsável pelo laboratório
- Administrador de Filial = Responsável pela unidade
- Operador = Usuário do APP no dispositivo para coleta



IMPORTANTE!

Apenas o operador consegue acessar o APP com seu usuário e senha no computador para o processo na operação.
Os administradores apenas acessam o sistema Manager Cockpit na web.

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários




Para configurar o laboratório e suas unidades clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

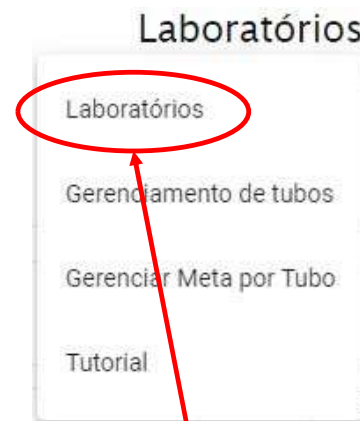




Para ver o cadastro do laboratório, criar filiais ou unidades clique aqui.

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

greiner / laboratories / list


 	
Nome	
	GBO Test Lab

Para ver o cadastro do laboratório clique aqui.

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



+ Novo Laboratório

Para criar uma filial ou nova unidade clique em “+ Novo Laboratório”.

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Novo Laboratório

Nome

CNPJ Sufix gbo.com/etrack

Telefone Dias Reportáveis

Responsável HUB

CEP Endereço

Complemento Número

Bairro Cidade Estado

Meta coleta segundos Plano

Habilitar QR Code Externo

Integração LIS

Pesquisa de Satisfação

Horário de Funcionamento

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Das: Até: +

No formulário da nova filial inserir no campo “sufix” o apelido da unidade, exemplo: Filial 1.

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Novo Laboratório

Nome

CNPJ Sufix gbo.com.etrack

Telefone Dias Reportáveis

Responsável HUB

CEP Endereço

Complemento Número

Bairro Cidade Estado

Meta coleta segundos Plano

Habilitar QR Code Externo

Integração Lis

Pesquisa de Satisfação

Horário de Funcionamento

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Das: Até: +

Informar no campo “Dias Reportáveis” a quantidade de dias de relatório que o operador terá acesso no APP.

Passo a passo



Novo Laboratório

Nome

CNPJ Sufix gbo.com.e-track

Telefone Dias Reportáveis

Responsável HUB

CEP Endereço

Complemento Número

Bairro Cidade Estado

Meta coleta 0 segundos Plano

Habilitar QR Code Externo Não

Integração Lis Não

Pesquisa de Satisfação Não

Horário de Funcionamento

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Das: Até:

Informar no campo “HUB”; **Sim**: se a unidade irá trabalhar com ponto central de coleta; **Não**: se a unidade irá trabalhar com um dispositivo em cada box de coleta.

Passo a passo

Novo Laboratório

Nome

CNPJ Sufix gbo.com.etrack

Telefone Dias Reportáveis

Responsável HUB

CEP Endereço

Complemento Número

Bairro Cidade Estado

Meta coleta segundos Plano

Habilitar QR Code Externo Não

Integração LIS Não

Pesquisa de Satisfação Não

Horário de Funcionamento

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Das: Até:

Informar se irá utilizar leitor de código de barras externo: **Sim**: se a unidade poderá utilizar na coleta; **Não**: a unidade não poderá selecionar este dispositivo.

Passo a passo

Novo Laboratório

Nome

CNPJ Sufix gbo.com.etrack

Telefone Dias Reportáveis

Responsável HUB

CEP Endereço

Complemento Número

Bairro Cidade Estado

Meta coleta segundos Plano

Habilitar QR Code Externo

Integração LIS

Pesquisa de Satisfação

Horário de Funcionamento

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Das: Até:

Informar se irá utilizar a pesquisa de Satisfação; **Sim**: a unidade deverá efetuar ao enviar os dados da coleta; **Não**: a unidade não irá efetuar a pesquisa após a coleta.

Passo a passo

Novo Laboratório

Nome

CNPJ Sufix gbo.com.etrack

Telefone Dias Reportáveis

Responsável HUB

CEP Endereço

Complemento Número

Bairro Cidade Estado

Meta coleta segundos Plano

Habilitar QR Code Externo Não

Integração LIS Não


Pesquisa de Satisfação Não

Horário de Funcionamento

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Das: Até: +

Informar se irá utilizar integração com o LIS: **Sim**: se a unidade poderá utilizar na coleta; **Não**: a unidade não poderá utilizar, funcionando off-line.

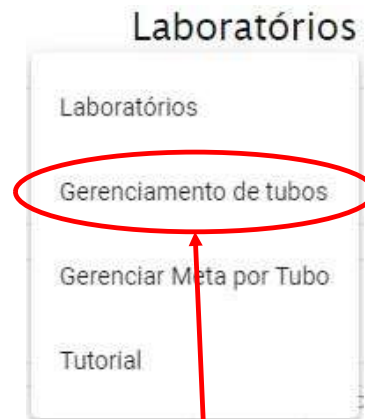

Neste menu podemos realizar a adição de tubos ao estoque, gerenciando e facilitando a sua gestão visual

Passo a passo



Seleção do Laboratório
GBO Test Lab

Histórico

Adicionar tubos

Remover tubos

Estoque

ID Tubo	Qtd de tubo(s)	Registro	
454036	0	07/01/2022	↕
454084	0	24/03/2022	↕
454071	100	22/02/2022	↕
454332BR	51	24/03/2022	↕
454107BR	-74	05/11/2021	↕
454482BR	-10	05/11/2021	↕
456036BR	133	12/11/2021	↕
456071BR	-7	21/03/2022	↕
454327BR	91	22/01/2021	↕
454036BR	-619	12/11/2021	↕
454096BR	500	15/02/2022	↕
1901263	10	22/02/2022	↕

Selecione o laboratório Matriz, em seguida clique para realizar a adição de tubos ao estoque, no caso de inventários, clique em “Remover tubos” para ajuste de estoque.

Passo a passo

Seleção o Laboratório
GBO Test Lab

Histórico Adicionar tubos Remover tubos

Estoque

ID Tubo	Qtd de tubo(s)	Registro
454036	0	07/01/2022
454084	0	24/03/2022
454071	100	22/02/2022
454332BR	51	24/03/2022
454107BR	-74	05/11/2021
454482BR	-10	05/11/2021
456036BR	133	12/11/2021
456071BR	-27	21/03/2022
454327BR	91	22/01/2021
454036BR	-619	12/11/2021
454096BR	500	15/02/2022
1901263	10	22/02/2022

Adicionar tubos

ID Tubo
454036

- 454036 (19120017571718)
- 454036SGH (19120017571794)
- 454036RU (19120049202321)
- 454036CN (19120049202987)
- 454036R (19120049208354)

Aqui podemos realizar a adição de tubos ao estoque, utilizando apenas os códigos com final BR

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Selecione o Laboratório

GBO Test Lab

Histórico

Adicionar tubos

Remover tubos

Estoque

ID Tubo	Qtd de tubo(s)	#registro	
454036	0	07/01/2022	↕
454084	0	24/03/2022	↕
454071	100	22/02/2022	↕
454332BR	51	24/03/2022	↕
454107BR	-74	05/11/2021	↕
454482BR	-10	05/11/2021	↕
456036BR	133	12/11/2021	↕
456071BR	-27	21/09/2022	↕
454327BR	91	22/01/2021	↕
454036BR	-619	12/11/2021	↕
454096BR	500	15/02/2022	↕
1901263	10	22/02/2022	↕

Para transferir tubos para as unidades de seu laboratório Matriz, clique nas setas indicadas.

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

The screenshot shows a mobile application interface titled "Transferência de tubos". It contains the following elements:

- A dropdown menu labeled "Selecione o Laboratório".
- A text input field labeled "ID Tubo" containing the value "454036".
- A text input field labeled "Quantidade de tubo" containing the value "0".
- Two blue buttons at the bottom: "Transferir" (circled in red) and "Voltar".

Para transferir tubos informe a unidade, o ID do tubo e a quantidade, logo após clicar em 'Transferir'.

Passo a passo



Selecione o Laboratório
GBO Test Lab

Histórico

Adicionar tubos

Remover tubos

Estoque

ID Tubo	Qtd de tubo(s)	Registro	
454036	0	07/01/2022	↕
454084	0	24/03/2022	↕
454071	100	22/02/2022	↕
454332BR	51	24/03/2022	↕
454107BR	-74	05/11/2021	↕
454492BR	-10	05/11/2021	↕
456036BR	133	12/11/2021	↕
456071BR	-27	21/03/2022	↕
454327BR	91	22/01/2021	↕
454036BR	-619	12/11/2021	↕
454096BR	500	15/02/2022	↕
1901263	10	22/02/2022	↕

Histórico


Transação realizada por	Origem	Destino	ID Tubo	Qtd de tubo(s)	Registro
Administrador Matriz		GBO Test Lab	454084	-100	24/03/2022
Administrador Matriz		GBO Test Lab	454332BR	-30	24/03/2022
Administrador Matriz		GBO Test Lab	456071BR	-50	21/03/2022
Gustavo Admin GBO		GBO Test Lab	1901263	10	22/02/2022

Neste menu podemos realizar a consulta do histórico das adições de tubos ao estoque

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

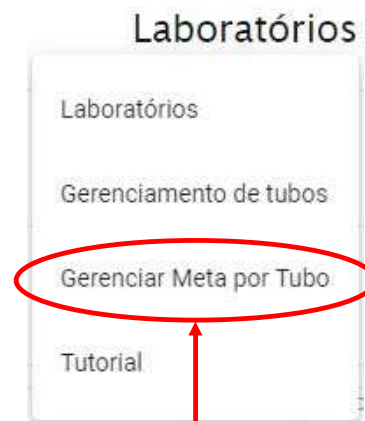

Neste menu podemos gerenciar o estoque de tubos e configurar as metas por unidades

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Seleção o Laboratório
GBO Test Lab

Nova Meta

Material	Meta		
454332BR	150	+	-
454107BR	100	+	-
454482BR	100	+	-
456071BR	100	+	-
454036BR	100	+	-
454327BR	120	+	-
456036BR	140	+	-

Items per page: 100 1 - 7 of 7 << < > >>

Clique aqui para definir a meta de tubos, sendo adotada com estoque mínimo

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Nova Meta

Material	Meta		
454332BR	150	+	-
454107BR	100	+	-
454482BR	100	+	-
456071BR	100	+	-
454036BR	100	+	-
454327BR		+	-
456036BR		+	-

Meta por Tubo

ID Tubo
456036BR

Meta
150

Voltar Salvar


page: 100 1 - 7 of 7

Preencha com o ID do tubo e a meta desejada

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

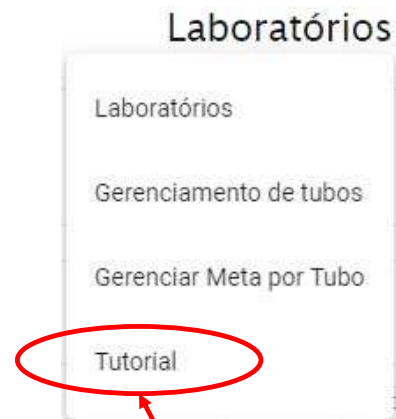

Acesse o tutorial para visualizar o conteúdo explicativo, incluindo vídeos do uso do aplicativo mobile e do Dashboard

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Manager Cockpit

Laboratórios

Usuários



Para acessar o dashboard e relatórios do laboratório e suas unidades clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Selecione o Laboratório

Visão Geral

A red oval highlights the dropdown menu area. A red arrow points from the text box below to the center of the oval.


Clique aqui para selecionar o laboratório e visualizar seu dashboard

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Manager Cockpit

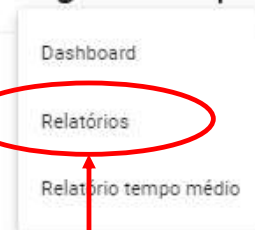

Clique aqui para selecionar e visualizar os relatórios do laboratório

Passo a passo



greinerBIO-ONE
eTRACK

greiner / reports

Laboratório: Operador: ID Tubo: Paciente:

Período: a

Laboratório	Data	Paciente	Aguilha	Tubo	Operador	Pesquisa
GeO Test Lab	28/03/2022 14:14	AY3X1A1AU9		455071BR C20113AN 04/05/2022	Operador GeO eTrack	Ruim
GeO Test Lab	28/03/2022 14:13	16936918802	450042 21A29D 28/01/2026	454036BR C210234E 03/06/2022 ,484520 A20103BD 07/02/2022 ,484520 A20103BD 07/02/2022 ,454107BR C2011365 01/11/2024 ,454107BR C2011365 01/11/2024	Operador GeO eTrack	Ruim
GeO Test Lab	28/03/2022 13:48	16936918802		456071BR C210234Y 03/06/2022 ,456071BR C210234Y 03/06/2022 ,454036BR C210234E 03/06/2022 ,454036BR C210234E 03/06/2022 ,454036BR C210234E 03/06/2022	Operador GeO eTrack	Regular
GeO Test Lab	28/03/2022 13:38	16936918802		454321BR C2111353 01/11/2022 ,456071BR C210234Y 03/06/2022 ,456071BR C210234Y 03/06/2022 ,456071BR C210234Y 03/06/2022 ,454036BR C210234E 03/06/2022 ,454036BR C210234E 03/06/2022	Silvia Barroso	Bom
GeO Test Lab	28/03/2022 13:37	16936918802		456071BR C210234Y 03/06/2022 ,456071BR C210234Y 03/06/2022 ,454036BR C210234E 03/06/2022 ,454036BR C210234E 03/06/2022	Silvia Barroso	Bom
GeO Test Lab	28/03/2022 13:32	16936918802	450042 21A29D 28/01/2026	454107BR C2011365 01/11/2024 ,454107BR C2011365 01/11/2024 ,454036BR C210234E 03/06/2022 ,454036BR C210234E 03/06/2022 ,454036BR C210234E 03/06/2022	Silvia Barroso	Bom
GeO Test Lab	28/03/2022 13:28	16936918802	450042 21A29D 28/01/2026	454107BR C2011365 01/11/2024 ,455071BR C20113AN 04/05/2022 ,455071BR C20113AN 04/05/2022	Operador GeO eTrack	Regular
GeO Test Lab	28/03/2022 13:50	070972452176		454321BR C2111353 01/11/2022 ,456071BR C210234Y 03/06/2022 ,455071BR C20113AN 04/05/2022	Operador GeO eTrack	Regular
GeO Test Lab	28/03/2022 14:12	070972452176		454321BR C2111353 01/11/2022 ,454321BR C2111353 01/11/2022 ,454321BR C2111353 01/11/2022 ,454321BR C2111353 01/11/2022 ,455071BR C20113AN 04/05/2022 ,455071BR C20113AN 04/05/2022 ,454036BR C210234E 03/06/2022 ,454036BR C210234E 03/06/2022	Operador GeO eTrack	Regular
GeO Test Lab	28/03/2022 13:50	070972452176		455071BR C20113AN 04/05/2022 ,454107BR C2011365 01/11/2024 ,454036BR C210234E 03/06/2022 ,456071BR C210234Y 03/06/2022	Operador GeO eTrack	Regular

Items per page: 10 | 1 - 10 of 29



Clique aqui para gerar o arquivo CSV do relatório

Passo a passo



Laboratório	Data	Paciente	Agulha	tubo	Operador
GB0 Test Lab	28/10/2021 14:18	J- 1234567890		454036BR C201136G 04/03/2022 ,454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022 , 456071BR C201136S 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022	Silvio Barroso
GB0 Test Lab	05/11/2021 17:01	0511-004	450042 21A29D 28/01/2026	484520 A20103BD 07/02/2022 ,454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022 ,454107BR C201136S 01/11/2024	Operador GB0 eTrack
GB0 Test Lab	05/11/2021 17:00	0511-003	450042 21A29D 28/01/2026	454036BR C201136G 04/03/2022 ,484520 A20103BD 07/02/2022 ,454036BR C201136G 04/03/2022 ,454107BR C201136S 01/11/2024	Operador GB0 eTrack
GB0 Test Lab	05/11/2021 14:27	0411-004	450042 21A29D 28/01/2026	456071BR C201136S 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022	Silvio Barroso
GB0 Test Lab	05/11/2021 14:26	0411-002	450042 21A29D 28/01/2026	484520 A20103BD 07/02/2022 ,454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022	Silvio Barroso
GB0 Test Lab	05/11/2021 14:25	0411-003	450042 21A29D 28/01/2026	454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022 ,454036BR C201136G 04/03/2022 , 456071BR C201136S 04/03/2022	Silvio Barroso
GB0 Test Lab	05/11/2021 14:25	0411-005	450042 21A29D 28/01/2026	456071BR C201136S 04/03/2022 ,454107BR C201136S 01/11/2024 ,454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022 , 454107BR C201136S 01/11/2024	Silvio Barroso
GB0 Test Lab	04/11/2021 17:28	0411-006	450042 21A29D 28/01/2026	454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022 ,454036BR C201136S 04/03/2022 ,454107BR C201136S 01/11/2024 , 454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 01/11/2024	Silvio Barroso
GB0 Test Lab	04/11/2021 17:14	0411-001	450042 21A29D 28/01/2026	484520 A20103BD 07/02/2022 ,454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022	Silvio Barroso
GB0 Test Lab	04/11/2021 16:52	2810-002	450042 21A29D 28/01/2026	454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022 ,454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022 , 454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022 ,454332BR C201135P 02/11/2021 ,454036BR C201136G 04/03/2022 , 454332BR C201135P 02/11/2021 ,454036BR C201136G 04/03/2022 ,456071BR C201136S 04/03/2022 ,454332BR C201135P 02/11/2021	Silvio Barroso

Gerar CSV

Descarte de Tubos indicados pela cor laranja
Tubos não utilizados destacados pela cor azul
Tubos corretamente utilizados destacados pela cor verde

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Manager Cockpit

Dashboard

Relatórios

Relatório tempo médio

Clique aqui para selecionar e visualizar os relatórios de tempo de atendimento coletas por coletador

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

greiner / reports-average

Laboratório

Selecione o Laboratório

Período

28/03/2022

a

28/03/2022

Procurar

Data	Laboratório	Operador	Tempo médio em segundos	Coletas
28/03/2022	GBO Test Lab	Operador GBO eTrack	52	20
28/03/2022	GBO Test Lab	Silvia Barroso	25	9



Itens por página: 10 1 - 2 of 2 < >

Tempo médio e quantidade de coletas por operador

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

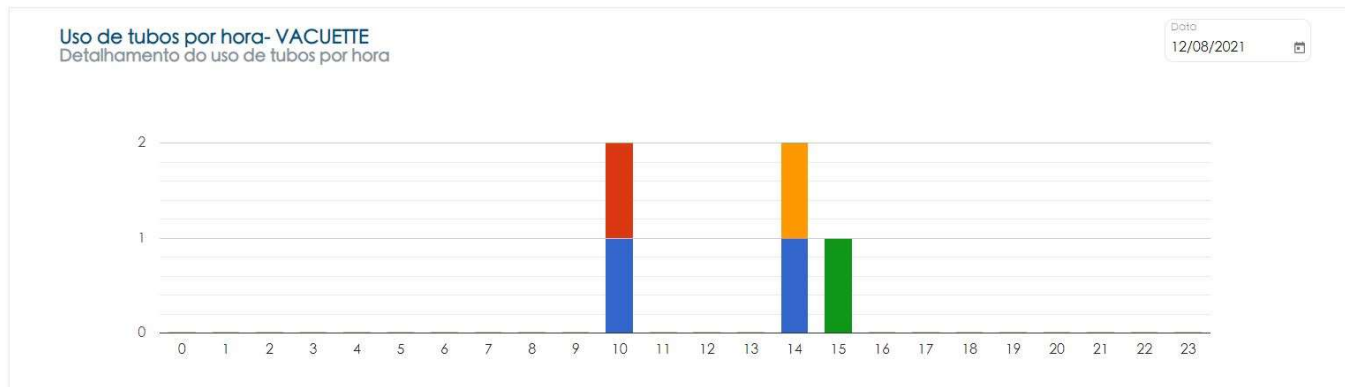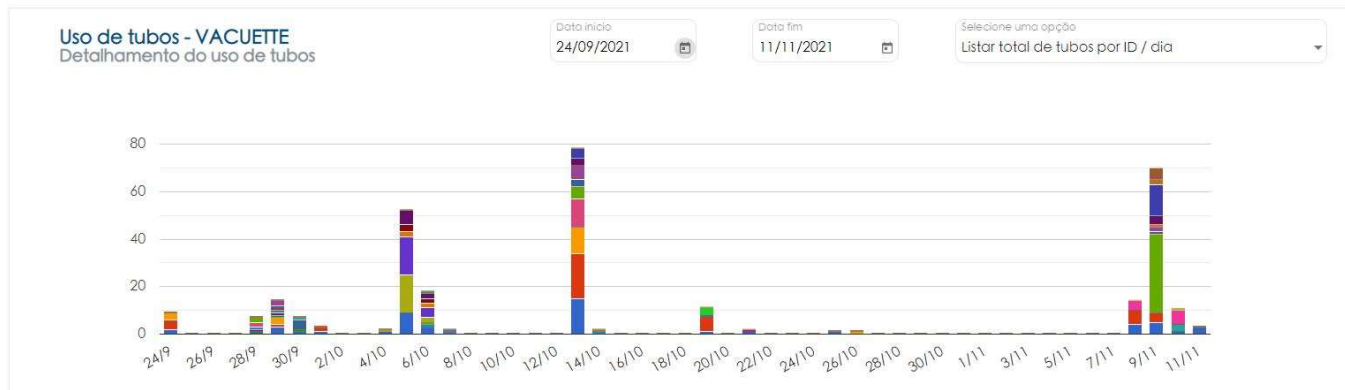


Gráficos indicando a quantidade de tubos utilizado por dia e por hora

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

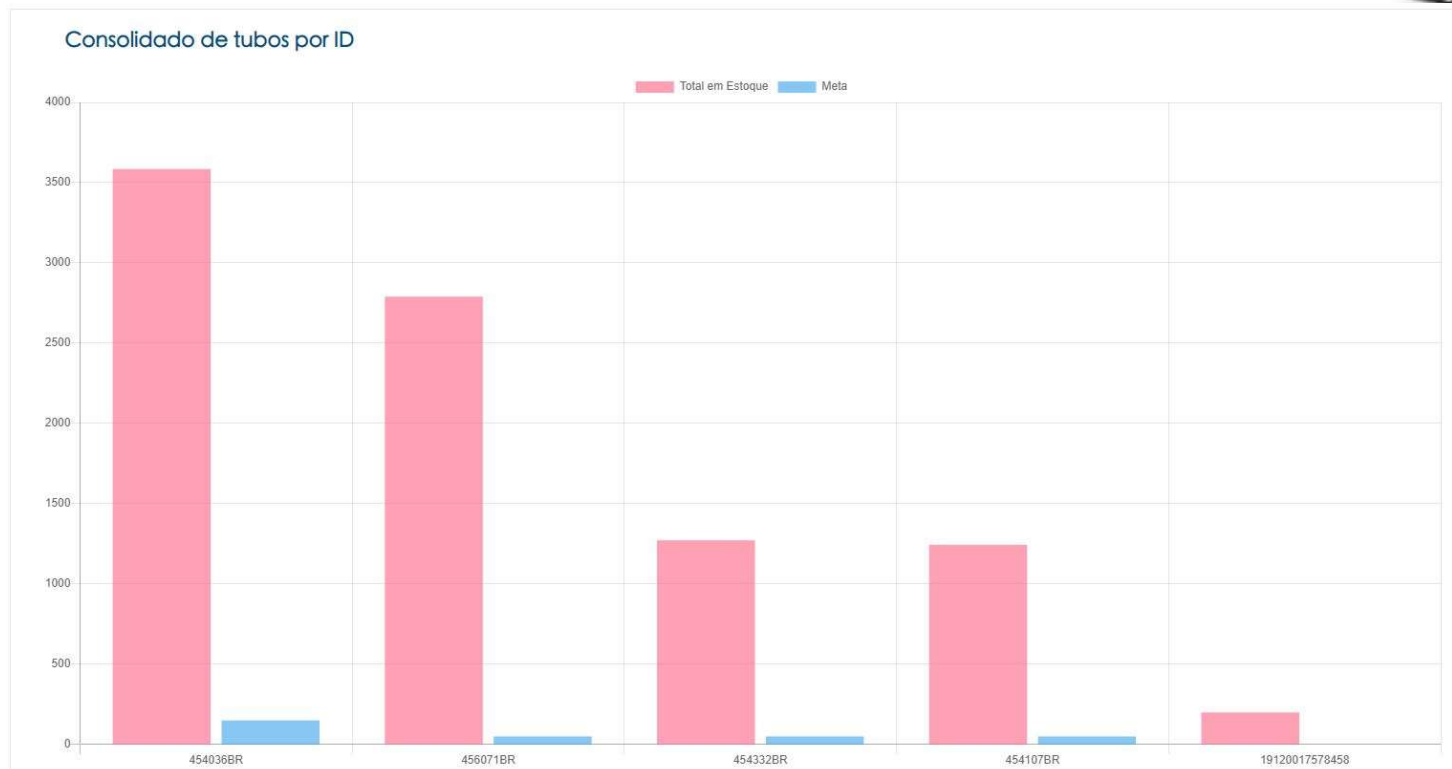

Gráficos para auxiliar a gestão visual do estoque

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK


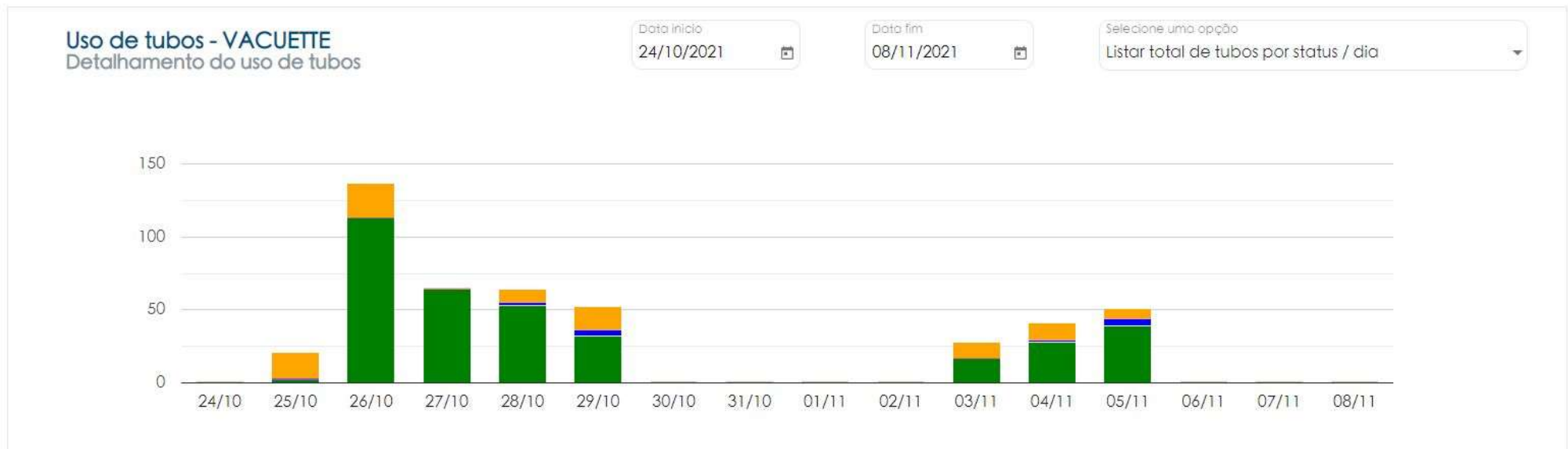


Gráfico indicando quantidade de descarte de Tubos

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

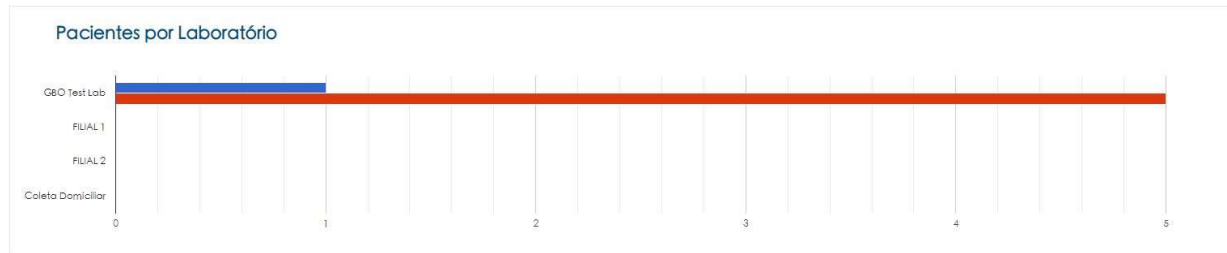

Tempo médio por paciente

Tempo médio de leitura dos tubos por paciente em todos os laboratórios.

Média: 46s / Meta: 37.50s

445 tubos

USADOS

Análise comparativa de 15 dias

Gráfico indicando quantidade de pacientes por laboratório, tempo médio para coletas realizadas e análise de uso de tubos por período

Passo a passo



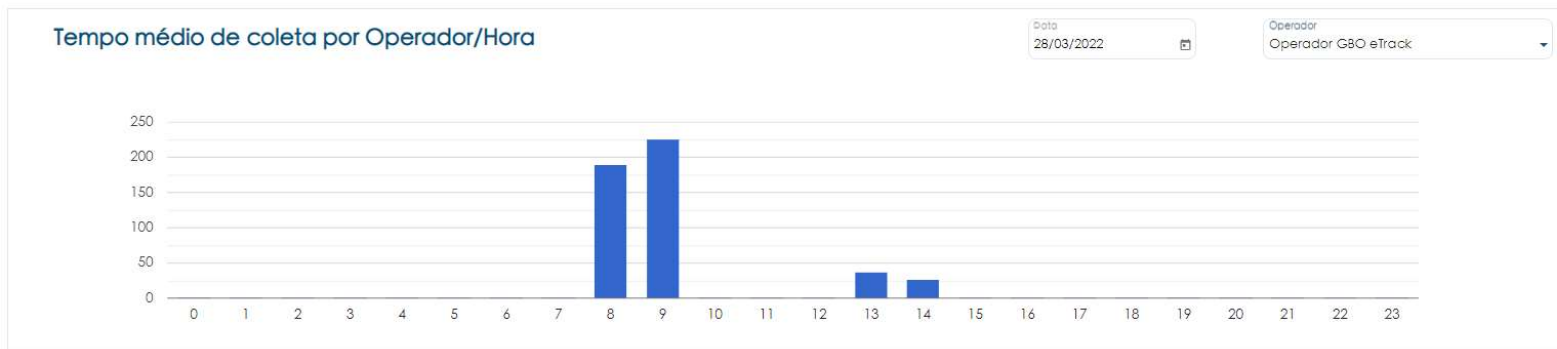


Gráfico indicando o tempo médio de coleta por dia e por hora de cada operador

Passo a passo

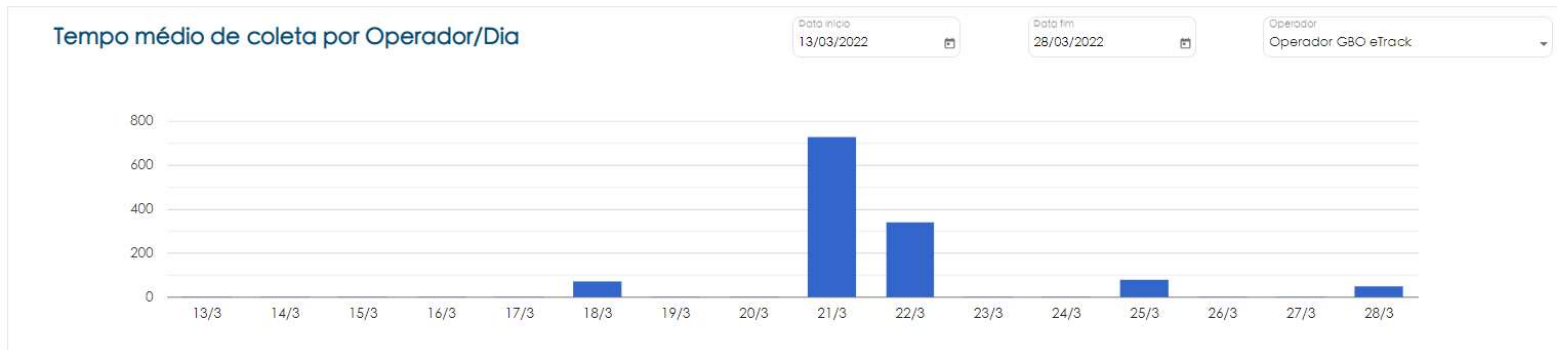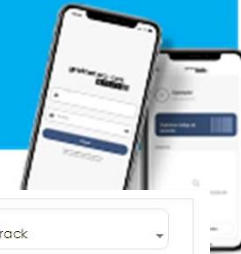

greiner BIO-ONE
eTRACK



Gráfico da média da pesquisa de satisfação por dia

MAIS CONTROLE
E SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
NA HORA DO EXAME.

Uso do APP em Computador



greiner BIO-ONE
eTRACK

Passo a passo




greiner BIO-ONE
eTRACK

- Fazer o download através da pagina www.gboetrack.com.br
- Seguir os passos de instalação
- Clicar no ícone “GBO eTrack” para abrir o APP em seu Computador
- Digitar seu usuário e senha

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

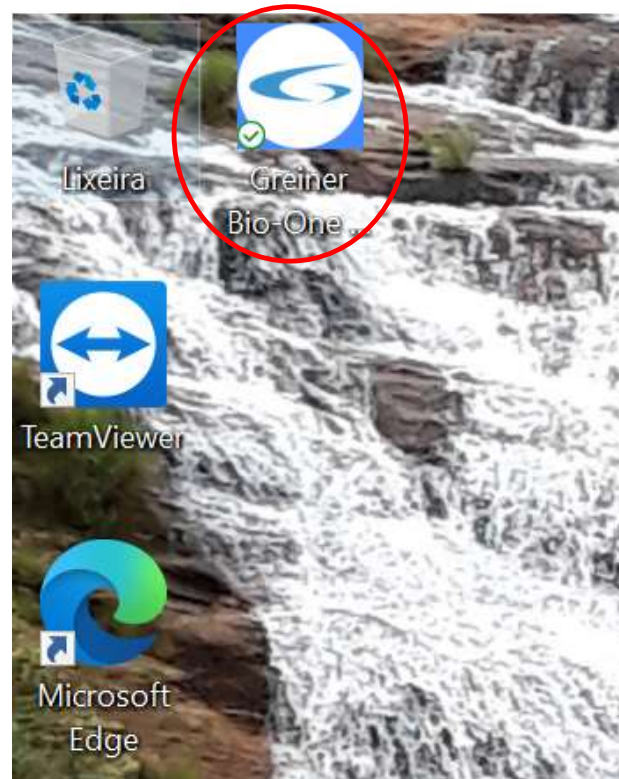

Ícone do GBO
eTrack

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

greiner BIO-ONE
eTRACK

Usuário

Senha

Entrar

Para se cadastrar, por favor entrar em contato com seu gestor

Digite seu usuário

greiner BIO-ONE
eTRACK

Usuário

Senha

Entrar

Para se cadastrar, por favor entrar em contato com seu gestor

Digite sua senha

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

greiner BIO-ONE
eTRACK


Usuário

Senha

Entrar

Para se cadastrar, por favor entrar em contato com seu gestor

Clique aqui para começar

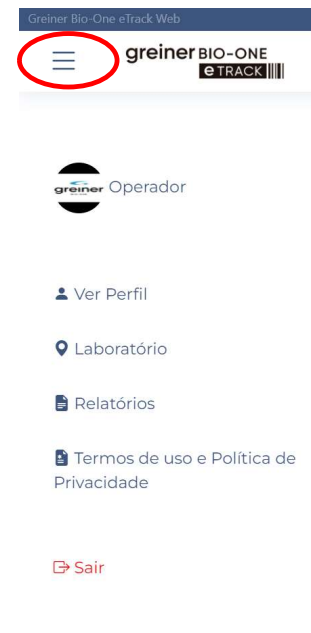

Clique aqui para acessar a barra de menu do App

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Aqui você pode ver seu perfil

Alterar Foto

greiner

Usuário

Operador

E-mail

operador@test.com

Laboratório

GBO Test Lab

Senha

Contato

(19) 99999-9999

Salvar Alterações

No seu perfil você pode editar suas informações e adicionar uma foto


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Aqui você pode ver as informações do laboratório

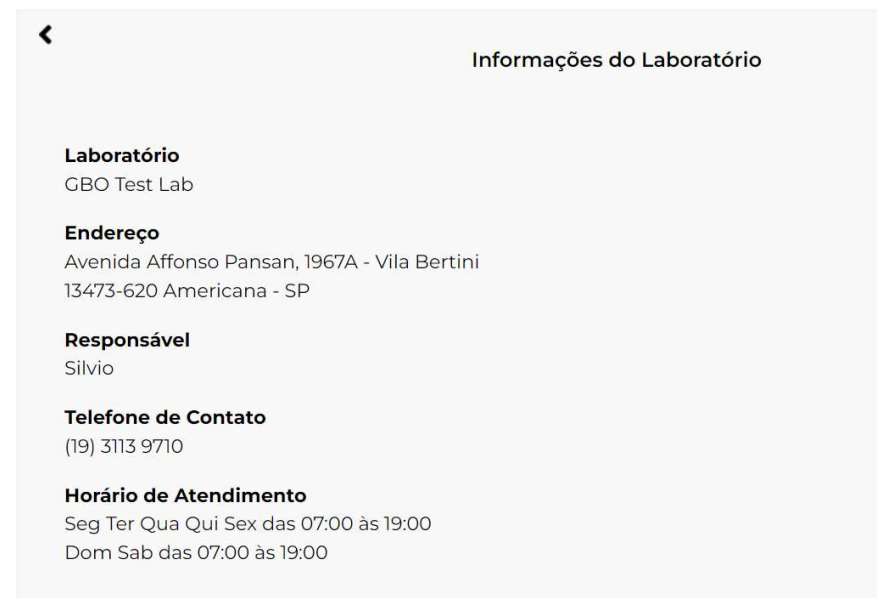

Informações do laboratório

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Relatórios

Enviados

Pesquisar

	Data	Hora	ID do paciente	ID do tubo	Editar
✓	17/05/2022	14:44	18851490202	454107BR 454036BR 454321BR	
✓	17/05/2022	14:43	18851490202	454036BR 454321BR 454321BR	
✓	17/05/2022	14:43	AY3X1A1AU9	454107BR 454036BR 454321BR	

Aqui você pode ver os relatórios, a mesma função do botão no menu principal

Você pode ver os relatórios dos pacientes enviados e pendentes


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK



Aqui você pode ver o Termos de Uso e Política de Privacidade

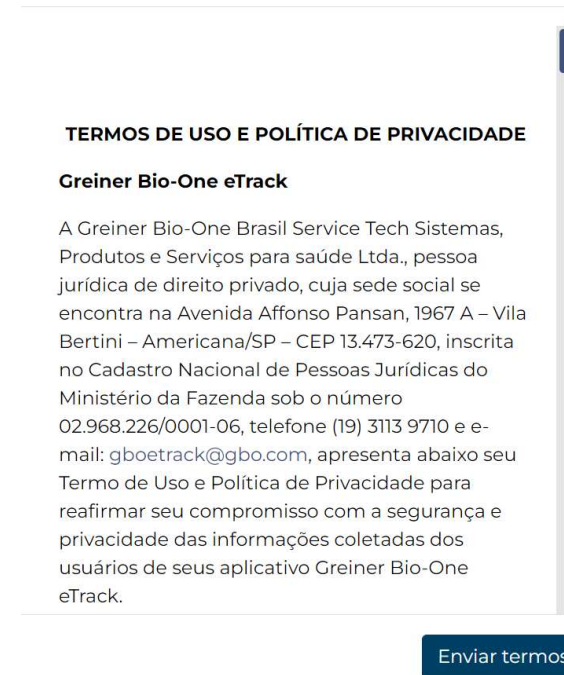


Termos de Uso e Política de Privacidade


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

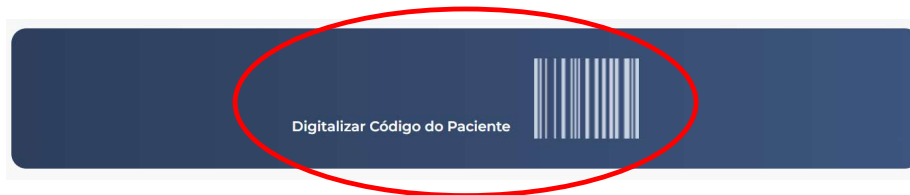

Clique aqui para efetuar a leitura do ID do paciente

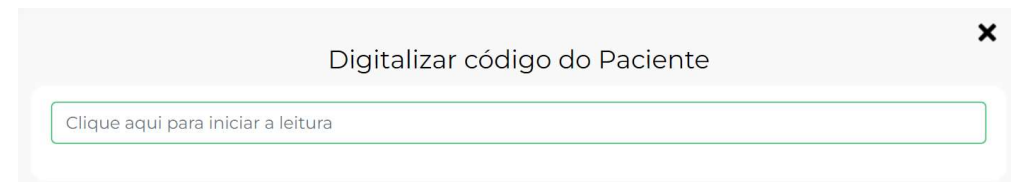

Efetuar a leitura do ID do paciente utilizando o leitor de código de barras

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Digitalizações

18851490202

Digitalizar códigos

Digitalizar Itens

18851490202

Pronto para iniciar a leitura

Lista de códigos digitalizados

Após confirmar o ID do paciente clique aqui

Efetuar a leitura dos materiais com o leitor ao término não haverá mais materiais na lista

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Digitalizar Itens

18851490202

Pronto para iniciar a leitura

Lista de códigos digitalizados

- 454107BR - Tubo para Transporte de Amostra VACUETTE®, 4 ml, transparente, 13x75, tampa branca, anel preto, sem aresta
- 454321BR - Tubo para Coagulação VACUETTE®, 2 ml, 9NC, citrato de sódio 3,2%, 13x75, tampa azul, anel branco, tubo sanduíche, PREMIUM
- 454036BR - Tubo de EDTA K3 VACUETTE®, 4 ml, K3E, 13x75, tampa roxa, anel preto, PREMIUM

Reiniciar

Enviar

Para enviar as informações

Digitalizar Itens

18851490202

Pronto para iniciar a leitura

Lista de códigos digitalizados

- 454107BR - Tubo para Transporte de Amostra VACUETTE®, 4 ml, transparente, 13x75, tampa branca, anel preto, sem aresta
- 454321BR - Tubo para Coagulação VACUETTE®, 2 ml, 9NC, citrato de sódio 3,2%, 13x75, tampa azul, anel branco, tubo sanduíche, PREMIUM
- 454036BR - Tubo de EDTA K3 VACUETTE®, 4 ml, K3E, 13x75, tampa roxa, anel preto, PREMIUM

Reiniciar

Enviar

Para reiniciar o processo clique aqui

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Avalie sua experiência conosco:



Ruim



Mediana



Boa



Ótima

◀ Confirmar

Ao término de cada processo, logo após clicar em enviar, opcionalmente pode ser efetuada a avaliação

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

	Data	Hora	ID do paciente	ID do tubo	
✓	17/05/2022	14:55	18851490202	454036BR 454321BR 454107BR	

Editar



✓	Data	17/05/2022
	Hora	14:55
3 itens	ID do paciente	18851490202

- 454036BR
C210234E
- Utilizado
 - Descartado
 - Não utilizado

454321BR

- Utilizado

Enviar alteração

Para editar os tubos, basta ler novamente o código de barras com o ID do paciente e clicar em “Editar”.

Na edição é possível informar se o tubo foi descartado ou não usado

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

✓
Data 17/05/2022
Hora 14:55
3 itens ID do paciente 18851490202

454036BR
C210234E
 Utilizado
 Descartado
 Não utilizado

454321BR
 Utilizado

Enviar alteração

Relatórios

	Data	Hora	ID do paciente	ID do tubo	Editar
✓	17/05/2022	14:55	18851490202	454036BR 454321BR 454107BR	
✓	17/05/2022	14:44	18851490202	454107BR 454036BR 454321BR	
✓	17/05/2022	14:43	18851490202	454036BR 454321BR 454321BR	

Após informar os Descartados e não utilizados, clicar aqui para finalizar o processo e enviar


Acessando os relatórios, selecionar o paciente para visualizar as leituras

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Exemplo de
etiqueta 2D no
tubo (UDI)

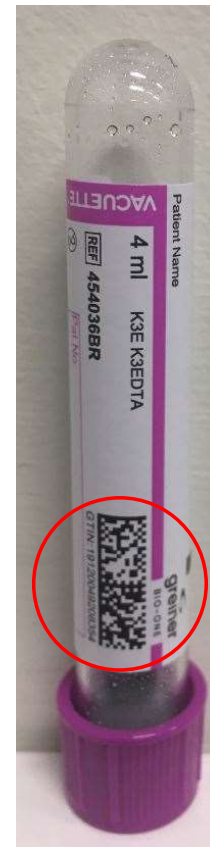

Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

- 1 - Ler o código com o ID do paciente
- 2 - Ler o código da caixa da agulha
- 3 - Ler o código da etiqueta do tubo
- 4 - Se o código da etiqueta não for aceito, clique em “OK” para ler outra etiqueta
- 5 - Se a leitura do código da etiqueta é de um “lote valido”
- 6 - O APP captura a informação da etiqueta e segue para próxima leitura de tubos
- 7 - Clicando em “Terminar”, você encerra o processo de leitura
- 8 - Clicando em “Enviar”, o APP irá enviar a informação coletada (com pesquisa*)
- 9 - Após o passo 8 você pode iniciar outro paciente

* Opcional


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Box de coleta

Com a utilização de dispositivos individuais, cada operador pode efetuar a leitura dos códigos nos tubos diretamente no box de coleta.

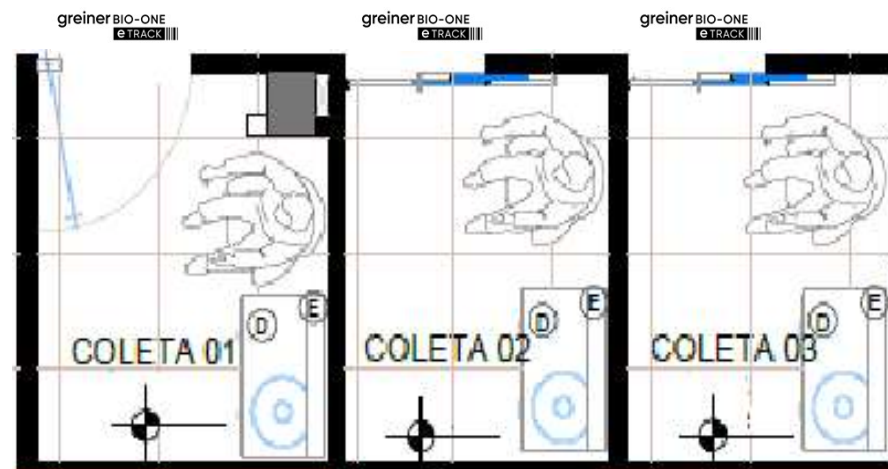


Passo a passo



greiner BIO-ONE
eTRACK

Hub de coleta

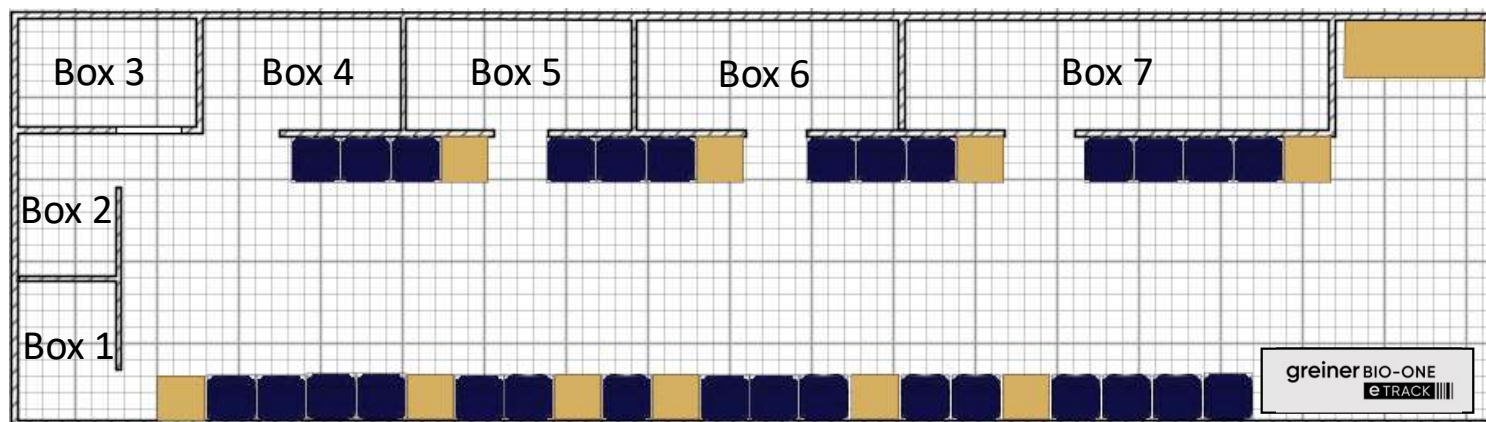

Com a utilização de um único dispositivo, podemos configurar um HUB podendo efetuar a leitura dos códigos nos tubos, preparando assim os kits para coleta.

making a difference

Agradecemos por sua parceria

www.gbo.com

GREINER BIO-ONE

Americana - São Paulo - Brasil

Telefone: +55 19 3468-9600

info@br.gbo.com




greiner
BIO-ONE